

improving people's lives



JAY Lite VIP

Ligero y con transpirabilidad superior

Esencial para el usuario activo



¿A quien va dirigido el Jay Lite? Indicaciones

- Usuario activo que requiere un cojín muy ligero, con estabilidad y con máxima disipación del calor y la humedad.
- Usuarios simétricos o levemente asimétricos
- El usuario debe ser capaz de realizar independientemente cambios de peso, riesgo medio de UPP

Características clave del JAY LITE

- El cojín más ligero en su gama
- Función Microclimática Superior
- Excelente estabilidad Pélvica-Tecnología Optiwell™
- Mantenimiento cero
- Fácil de limpiar
- Facilidad en transferencias



1 Ligereza, especialmente diseñado para el usuario Activo

- Increíblemente ligero
- Facilidad en las transferencias

2 Estabilidad y Soporte con Protección de la Piel

- Tecnología OptiWell
- Diseño de base único para protección tuberosidades y sacro

3 Función Microclimática superior

Optima disipación del calor y humedad

- Funda Microclimática 3DX
- Base Perforada

4 Opciones de relleno Hondonada

5 Especificaciones técnicas

- Hoja de pedido




1 Especialmente diseñado para el usuario activo Increíblemente ligero

- Desde 660 gramos (35x35) hasta 1090 gramos (50x50)
- **Ligereza y transpirabilidad en todos los componentes**
- Base de espuma perforada, transpirable y muy ligera
- Funda con tejido **3DX™** con transpirabilidad y ligereza superior
- Ligero relleno de espuma microperforada, extraíble y con transpirabilidad alta (95 gramos)



2 Estabilidad y soporte con protección de la piel

- La **hondonada pélvica Optiwell™** garantiza la estabilidad del usuario activo optimizando su función (diseñada con los resultados de estudios antropométricos)
 - Estabilidad lateral y anteroposterior para postura simétrica y óptima función
 - Redistribución de peso desde las zonas de riesgo (tuberosidades isquiáticas) hacia el fémur para protección piel
- **Nuevo diseño de hondonada más amplio**
 - Mayor reducción de peso en trocánteres
 - Mayor comodidad

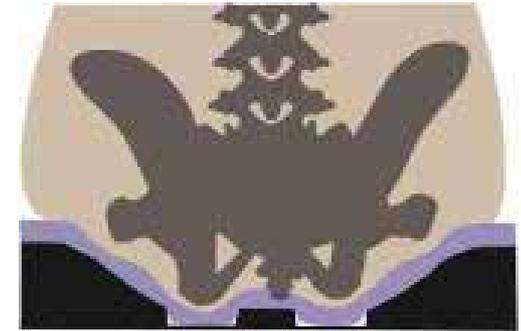

La pared de la hondonada **pre-contorneada se acopla de forma óptima** a la anatomía pélvica.

Mínima Compresión y Fuerza de Reacción
Tecnología Optiwell™

2 Estabilidad y soporte con protección de la piel


El diseño de la base reduce significativamente las fuerzas de reacción, optimizando el reparto de presión

Relleno de espuma microperforada




Corte Sacro (confort y protección de zona sacro-coccygea)

Cortes Isquiáticos (Minimizan la presión bajo tuberosidades isquiáticas protegiendo la integridad de la piel)

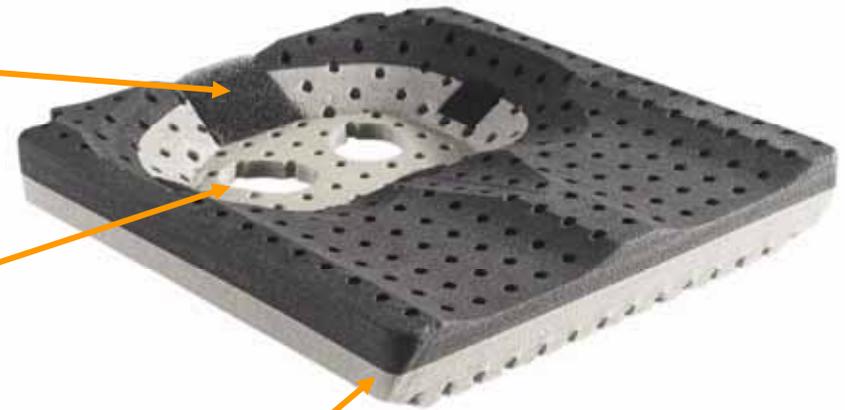

Cortes laterales para reducción de altura asiento suelo y reducción de carga sobre trocánteres

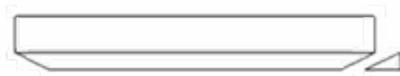

Opción Jay Lite Standard o Jay Lite Posicionamiento

El modelo Jay Lite Posicionamiento añade al cojín soporte lateral y medial de fémur, para alineación de EEII y optimización de la estabilidad integral del usuario



JAY Lite Std

JAY Lite Posicionamiento




3 Función microclimática superior

Los materiales y el diseño del cojín facilitan el flujo del aire, para máxima disipación del calor y la humedad, protegiendo la piel del usuario

- Base perforada
- Funda Microclimática con tejido 3DX
- Relleno de espuma microperforada con funda transpirable


**Microclimatic
Material**

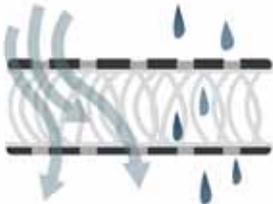

4 Dos opciones de Relleno en Hondonada Pélvica, extraíbles e intercambiables

Relleno de espuma Microperforada

- Incluida de serie
- Con funda transpirable para favorecer la respiración de la piel
- Transpirabilidad alta en hondonada (donde hay mas riesgo de humedad)
- Lavable a maquina (relleno con funda)
- Ligero (95 gramos con funda)

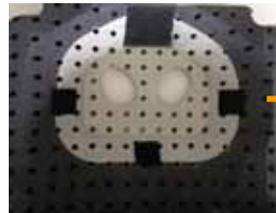

Relleno de espuma de Poliuretano

- Disponible solo como repuesto
- Con funda de incontinencia
- Fácil limpieza



Especificaciones Técnicas

Anchura del cojín:	35 a 50 cm
Profundidad del cojín:	35 a 50 cm
Altura del cojín:	7 cm
Peso maximo de usuario:	150 kg
Peso del cojín:	660 ggr a 1090 gr
Relleno de la hondonada:	Espuma microperforada con funda transpirable como standard (relleno de espuma de poliuretano con funda de incontinencia opcional)
Funda exterior:	Microclimática
Opciones de la base:	2 modelos: Standard y Posicionamiento - base contorneada para un mejor soporte de las piernas



JAY Lite



Ligero y con transpirabilidad Superior:
Esencial para el usuario activo

