



Wellell Group

Manual de usuario de silla de transferencia multifuncional Easy move



ÍNDICE

1 Resumen del "Manual de Instrucciones"	1
2 Ámbito de aplicación.....	1
3 Precauciones para un uso seguro	1
4 Especificaciones del producto, nombres de los componentes	4
5 Utilidad	7
6 Limitaciones de uso.....	8
7 Instrucciones de montaje	8
8 Instrucciones de uso	13
9 Conservación y formas de mantenimiento	18
10 Listado de piezas	19
11 Condiciones y métodos especiales de almacenaje	20
12. Garantías.....	21

1. Resumen del "Manual de Instrucciones"

Este manual de instrucciones corresponde a una silla de ruedas de transferencia multifuncional. Incluye información sobre las precauciones que se deben tomar para utilizarla de forma segura, una descripción de las funciones que ofrece y orientaciones sobre el mantenimiento de la misma.

Las imágenes contenidas en este manual se aportan únicamente a modo de referencia. Remítase al producto que esté efectivamente utilizando.

2. Ámbito de aplicación

Este producto está destinado a personas discapacitadas, pacientes, personas mayores y enfermos. Se utiliza para que el usuario pueda ser transferido o pueda hacer sus necesidades.

3. Precauciones para un uso seguro

- Para poder utilizar la silla correctamente, asegúrese de leer detenidamente las "Precauciones para un uso seguro" aquí contenidas.
- No seguir las instrucciones contenidas en "Precauciones para un uso seguro" podría provocar daños en el producto, lesiones al usuario e incluso dar lugar a situaciones susceptibles de poner en peligro su vida.
- La persona que manipule la silla deberá comprender lo indicado en el manual antes de utilizarla.
- No permita el manejo de la silla de transferencia por niños pequeños o personas que no puedan entender su funcionamiento.

Asegúrese de seguir las indicaciones. La seguridad constituye un elemento de máxima importancia.

* Después de leer el manual de instrucciones, consérvelo en un lugar donde pueda consultarlo en cualquier momento.

ADVERTENCIA

1. Antes de utilizar la silla, debe comprobar que no falte ningún componente y que todos ellos se encuentren firmemente sujetos para garantizar un uso seguro.
2. Ajuste la altura necesaria de la silla antes de utilizarla y asegúrese de que ambas partes del asiento permanezcan al mismo nivel.
3. Al utilizar la silla de transferencia, asegúrese de que el cierre de seguridad esté bloqueado y el cinturón de seguridad abrochado.
4. Cuando el usuario se siente o se incorpore de la silla de transferencia, las ruedas deberán estar bloqueadas.
5. Si el usuario desea retirar objetos que posee mientras permanece sentado (localizados en la parte frontal, lateral o posterior), deberá prestar atención a que la inclinación de su cuerpo no resulte excesiva a fin de evitar que la silla pierda peso y vuelque.
6. El usuario no se deberá agachar por debajo de la altura de las rodillas para recoger objetos en el suelo.
7. Al ajustar la altura del asiento, las ruedas delanteras deberán permanecer bloqueadas. Se deberá empujar con las empuñaduras de ambos lados de la silla a una velocidad constante.
8. No confíe en la inercia para hacer que la silla de ruedas de transferencia suba rápidamente las escaleras, ya que podría provocar un accidente o causar daños al usuario. Al subir y bajar escaleras, la

persona que opere la silla no deberá mover al usuario junto con la propia silla, ante la posibilidad de lesionarle.

9. La silla de ruedas de transferencia es adecuada para desplazarse por terrenos llanos. Se deberá sortear baches y obstáculos para evitar el riesgo de vuelco.
10. Cuando la pendiente de descenso sea superior a 5 grados, la persona que opere la silla de transferencia deberá sujetarla por detrás, firmemente, con cuidado y evitando inclinarla hacia adelante. Si se inclinase hacia adelante en una pendiente descendiente, el peso del usuario podría hacerle vencer y provocar su caída.
11. Al permanecer en un terreno inclinado, las cuatro ruedas deberán estar bloqueadas.
12. Los frenos de las cuatro ruedas de la silla de ruedas de transferencia solo sirven para frenar cuando está estacionada. No son dispositivos de frenado y no se deberán utilizar para desacelerar o frenar durante los desplazamientos.

4. Especificaciones del producto, nombres de los componentes

Especificación	
Modelo N°	0401113
Longitud	710mm
Anchura	600mm
Altura	790-990mm
Tamaño de la rueda delantera	1.270 mm
Tamaño de la rueda trasera	762 mm
Anchura del asiento	460mm
Profundidad del asiento	400mm
Distancia del asiento al suelo	370-570mm
Peso neto	25,5kg
Peso máximo	100kg

Este producto está compuesto por la base, respaldo izquierdo del asiento, respaldo derecho del asiento, inodoro portátil, montante, rueda delantera de 1.270 mm, rueda trasera de 762 mm, reposapiés, etc. El material está soldado con tubo de acero de alta resistencia.



- 1 - Rueda delantera
- de 1.270 mm
- 2 - Reposapiés
- 3 - Tubo rueda trasera
- 4 - Rueda trasera
- de 762 mm
- 5 - Base
- 6 - Cubo de inodoro
- 7 - Cojín acolchado
- 8 - Respaldo lateral

izquierdo

- 9 - Respaldo lateral

derecho

*Las imágenes contenidas en este manual se aportan solo a modo de referencia. Remítase al producto que esté efectivamente utilizando.

5. Utilidad

- Apropiada para personas con dificultades de movilidad, para pasar de la silla de ruedas al sofá, la cama, un asiento, etc.
- El diseño de amplia apertura y cierre facilita al asistente sujetar al usuario desde abajo, evitando así lesiones en la cintura. La carga máxima es de 100kg. Silla apta para personas con todo tipo de contorno físico.
- Altura del asiento ajustable, adecuada para mobiliario e instalaciones de diferentes alturas.
- Ruedas silenciosas y frenos estables y fiables.
- El diseño de doble garantía mediante bloqueo y cinturón de seguridad duplica la seguridad de los usuarios.
- Cojín del asiento de grosor especial, cómodo para permanecer sentado durante espacios de tiempo prolongados. La funda del asiento es extraíble y lavable.
- El diseño de liberación rápida de la columna facilita el desplazamiento de la silla de transferencia y amplía el rango de movimiento.

6. Limitaciones de uso

La silla de transferencia es adecuada para su uso en interiores, a una velocidad de desplazamiento de ≤ 3 km/h.

7. Lista de componentes



Tras abrir la caja de embalaje, compruebe la presencia de las siguientes piezas y accesorios:

Nº	Nombre	Artículo	Cantidad
1	Asiento Base	Juego	1
2	Tubos ruedas pequeñas	Juego	2
3	Bastidor izquierdo silla	Juego	1
4	Bastidor derecho silla	Juego	1
5	Respaldo izquierdo de plástico	Juego	1
6	Respaldo derecho de plástico	Juego	1
7	Inodoro	Juego	1
8	Rejilla de acero para inodoro	Pizas sueltas	1
9	Cojín asiento	Pizas sueltas	1
10	Juego de herramientas	Juego	1
11	Accesorios tornillos	Juego	1
12	Instrucciones	Pizas sueltas	1


8. Instrucciones de montaje

1) Coloque el respaldo derecho de plástico en el bastidor derecho del asiento y fíjelo con 4 tornillos M5 y 4 arandelas curvas, como se muestra en la imagen: (El bastidor izquierdo del asiento se instala de la misma manera).


★ Si el cinturón de seguridad opcional, se deberá atornillar en este punto.

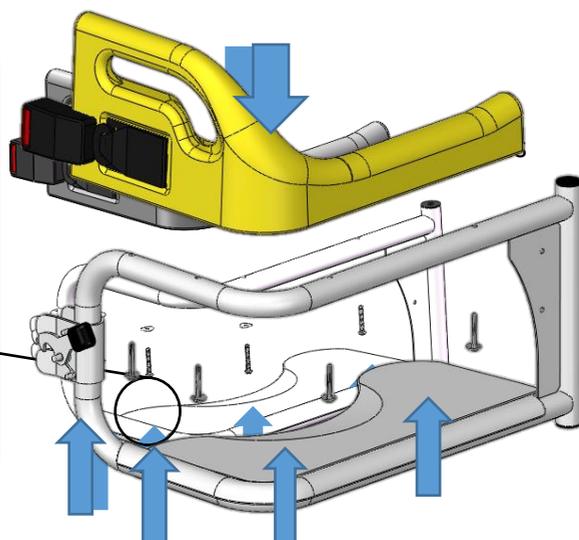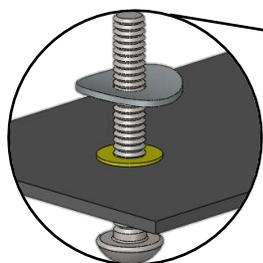

2) Coloque el tubo de la rueda pequeña bajo la ranura de sujeción del tubo de la rueda de la base, y fíjelos con 4 tornillos M10, 4 arandelas planas grandes M10, 4 arandelas planas M10 y 4 tuercas de seguridad M10, como se muestra en la imagen:

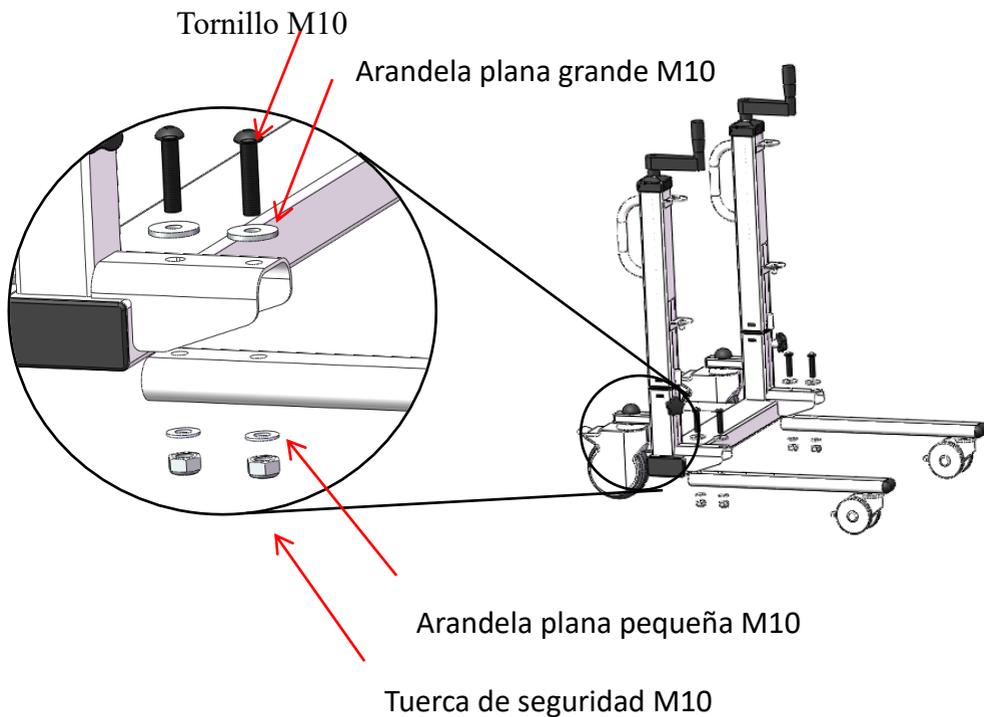


3) Disponga el bastidor derecho del asiento entre las dos pestañas del tubo de la columna derecha de la base, pase el tornillo M8 y la arandela plana a través de la columna, y fíjelo con una tuerca de sombrerete M8 (como se muestra en la imagen a continuación). El bastidor del asiento, oculto tras su instalación, quedará suelto y se podrá girar con facilidad. Coloque una cubierta protectora negra sobre la cabeza del tornillo (el bastidor izquierdo del asiento se instala de la misma manera).

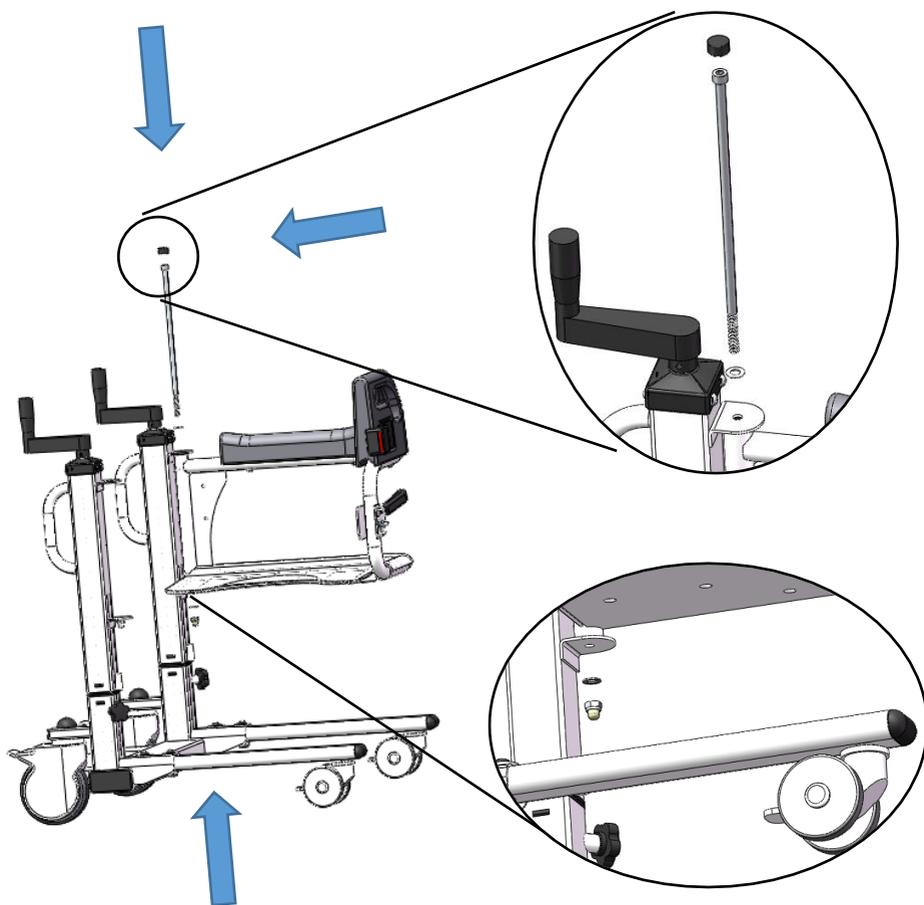

4) Si necesita utilizar el inodoro, instale primero la rejilla de acero del inodoro en los orificios de montaje de los dos montantes y, a continuación, coloque el inodoro por la parte trasera, como se muestra en la siguiente imagen:

★ Si el soporte para sueros es opcional, se puede instalar en los montantes derecho/izquierdo.

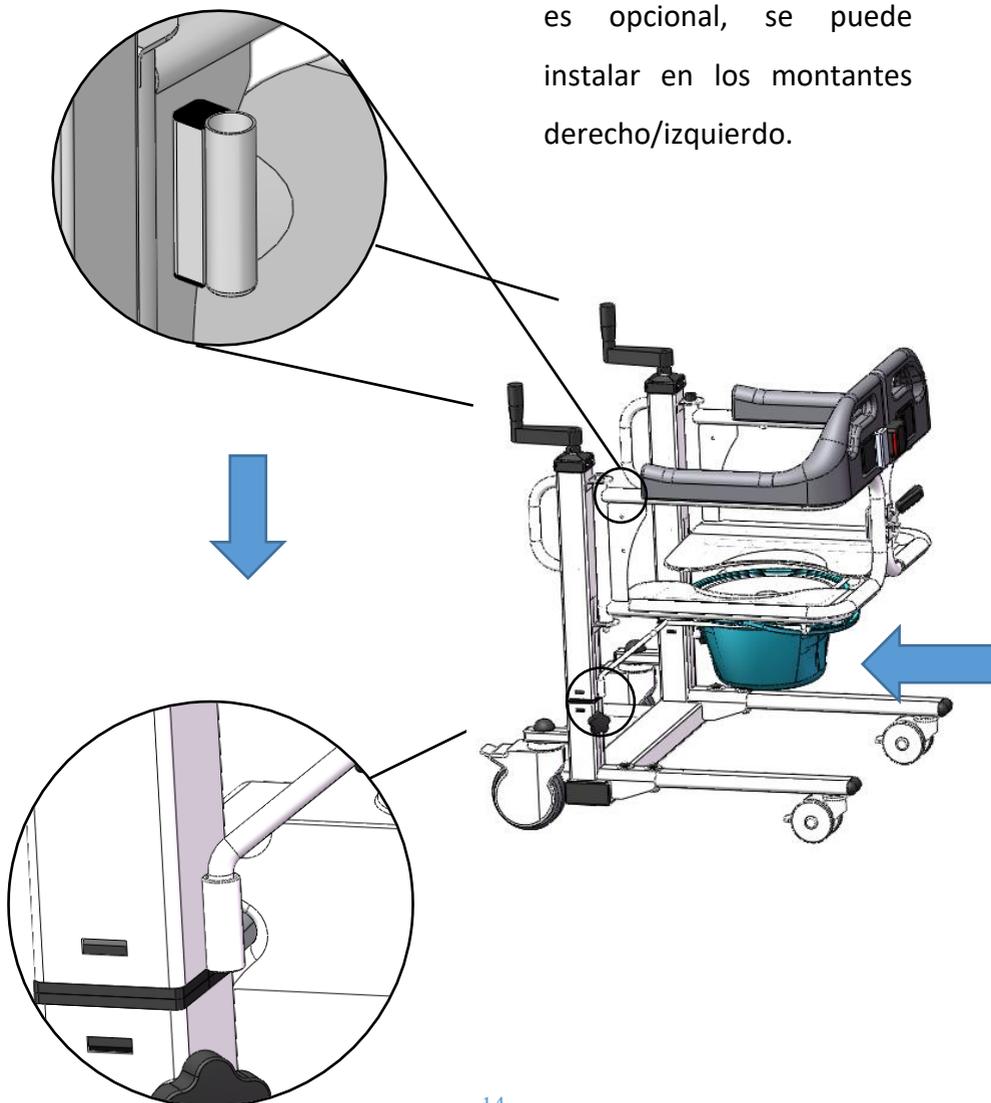

9. Instrucciones

A continuación, se explica el método que se deberá seguir cuando el asistente transfiera al usuario del asiento a la cama. Se deberá seguir el mismo proceso para transferir de la cama al asiento.

1) Asegúrese de que el usuario esté sentado con la espalda erguida, y ajuste la altura del bastidor del asiento de la silla de transferencia de tal forma que la superficie inferior quede ligeramente por encima de la superficie plana del asiento.



2) Cuando el usuario esté correctamente sentado en el asiento de la silla, cierre completamente los respaldos izquierdo y derecho. El cierre de seguridad los bloqueará automáticamente. A continuación, el asistente deberá abrochar el cinturón de seguridad.



3) El usuario deberá adoptar una postura sentada cómoda y apoyar las dos manos sobre los reposabrazos de ambos lados;

4) El asistente comprobará la distancia entre la superficie inferior del bastidor de la silla de transferencia y el asiento, lo elevará de 2 a 3 cm, soltará el freno de la rueda delantera de 1.270 mm y retirará lentamente la silla de transferencia del asiento;

5) El asistente empujará la silla de transferencia desde atrás para desplazarla hasta el borde de la cama.

6) Compruebe la altura del bastidor del asiento de la silla de transferencia en el borde de la cama para asegurarse de que la superficie inferior sea ligeramente más alta que la superficie de la cama (si fuera necesario ajustar la altura del bastidor del asiento, deberá bloquear las ruedas delanteras de 1.270 mm);



7) El asistente empujará al máximo la silla de transferencia hasta la posición predeterminada de la cama del hospital, bloqueará el freno de las ruedas delanteras de 1.270 mm y volverá a ajustar la altura del bastidor del asiento para que la superficie inferior quede ligeramente por encima de la superficie de la cama.

8) Desabroche el cinturón de seguridad y desbloquee el cierre de seguridad del respaldo de la silla de transferencia. Abra lentamente los respaldos derecho e izquierdo del asiento para permitir que las nalgas del usuario reposen sobre la cama.

9) El asistente deberá desbloquear las ruedas delanteras de 1.270 mm, levantar los pies del usuario y alejar de la cama la silla de transferencia.

★ Si se desea instalar un soporte para sueros, gire el pomo para fijar y ajustar la altura. Si, una vez montado el soporte para sueros en la silla de transferencia, necesita ajustar la altura del bastidor del asiento, deberá retirarlo previamente.



★ Si el cinturón de seguridad es opcional, ajuste la longitud a la posición adecuada antes de utilizarlo.



10. Conservación y formas de mantenimiento

- No raye ni raspe la superficie del producto con objetos pesados para evitar daños materiales.
- Realice una limpieza y un mantenimiento diarios. Aplique detergente sintético neutro y limpie con un paño húmedo. A continuación, pase un paño.
- Evite poner la silla en contacto con ácidos y álcalis fuertes para evitar la corrosión.
- Compruebe regularmente la presencia de tuercas y tornillos sueltos, piezas dañadas o rotas y, si es necesario, sustituya las piezas dañadas.

11. Condiciones y métodos especiales de almacenaje

El producto embalado se debe almacenar a una temperatura de entre -0°C a 40°C, con una humedad relativa no superior al 80%, sin gases corrosivos y en un espacio debidamente ventilado y limpio. Durante su transporte manténgase alejado de la humedad, la luz solar y las fuentes de calor.

12. Garantías

En el caso de una reclamación el consumidor debe dirigirse al establecimiento donde adquirió el producto o al proveedor autorizado.

En el caso de que sea imposible contactar con el establecimiento donde se adquirió el bien, para cualquier duda o reclamación puede enviarnos un e-mail a incidencias@apexmedical.es, llamar al teléfono 94.470.64.08 o contactar con nuestros comerciales.

La garantía de nuestros productos se inicia desde el día en que APEX MEDICAL entrega el producto al cliente, en general desde la fecha del albarán más 1 o 2 días de transporte.

El producto se recogerá o entregará, en el caso de que sea necesario, en el lugar donde se ha emitido la correspondiente factura. El producto deberá estar correctamente embalado y en unas condiciones razonables de higiene.

Para la aprobación de la garantía como consecuencia de una queja o reclamación por cualquier defecto o incidencia en el producto es obligatorio presentar la siguiente información:

- El nombre o razón social del comprador.
- El número de serie del producto.
- Descripción del problema o defecto del producto.
- Fotos del equipo dañado en casos de roturas, desperfectos, golpes, etc.

De no presentar dicha información, la garantía quedará exenta.

Los defectos o desperfectos debido a una incorrecta conservación, utilización o manipulación del producto o de sus materiales o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

Las reparaciones sólo pueden realizarse por el servicio técnico de APEX o por centros autorizados.

Apex declina cualquier responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad como resultado del uso incorrecto o peligro- so de los productos comercializados.

El comprador asume y acepta todas las condiciones de venta y garantía aquí expuestas en la compra de cada producto adquirido a APEX MEDICAL.



Wellell Group

Distribuidor:

APEX MEDICAL S.L.

C/ Elcano 9, 48008, Bilbao, Vizcaya

Fabricante:



GUANGDONG DAYANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China.

SUNGO EUROPE B.V.

Olympisch Station 24, 1076DE Amsterdam

