



GUÍA RÁPIDA – ESPAÑOL



eFOLDi

Despliegue de la silla eléctrica eFOLDi

Antes de comenzar, coloque la silla eléctrica en un espacio abierto lejos de mascotas y niños pequeños.

El despliegue es sencillo y con un poco de práctica podrá configurarlo en segundos.

Le recomendamos que practique con la Power Chair antes de aventurarse por primera vez.



FOLDING VIDEO



1 Las ruedas antivuelco y el cargador de batería se suministran con su silla eléctrica.



2 Instale las ruedas antivuelco si lo desea. Estos simplemente presionan y bloquean en su lugar.



3 Despliegue la silla eléctrica simplemente empujando la parte inferior del asiento hacia abajo.



4 Mantenga el cable del controlador alejado de los puntos de pellizco, como los soportes del reposabrazos.



5 Instale los soportes del reposabrazos en las ranuras y presiónelos hacia abajo hasta que se bloqueen.



6 Tome la unidad de control y...



7 ...inserte la varilla del controlador en el ajuste del reposabrazos debajo del reposabrazos.



8 ...ajuste la posición del controlador y apriete con la perilla moleteada.



9 Retire el control del asistente del bolsillo trasero y conéctelo a la barra en la parte trasera.



10 Tire del reposapiés hacia abajo.



11 Instale los cojines de los asientos como se muestra. Estos se mantienen en su lugar mediante lengüetas de velcro...



12 ...asegúrese de que estén doblados sobre el respaldo y debajo del asiento. La silla eléctrica ya está lista.

Cómo plegar la silla eléctrica eFOLDi



1 Afloje ligeramente la perilla moleteada y retire el controlador.



2 Coloque el controlador y la correa del cinturón de seguridad en el asiento.



3 Retire el control del asistente y colóquelo en el bolsillo en la parte trasera de la silla.



4 Retire el control del asistente y colóquelo en el bolsillo en la parte trasera de la silla.



5 ... presionando el pequeño botón plateado para ajustar los reposabrazos.



6 Verifique que las ruedas delanteras estén colocadas adelante para garantizar un plegado suave.
Consejo tire de la silla hacia atrás para alinear las ruedas



7 Luego alcance debajo del borde del asiento y tire de la barra de liberación hacia arriba para liberar el asiento y...



8 ...tire del asiento hacia arriba para plegar la Power Chair.



9 Plegar el reposapiés hacia adentro.

Funcionamiento de la silla eléctrica eFOLDi



Las baterías se pueden quitar presionando la pestaña roja hacia arriba y tirando hacia atrás.



Aquí enciende la alimentación principal que alimenta el controlador del teléfono.

Siempre apáguelo cuando la silla no esté en uso para conservar la energía de la batería.



Encienda el controlador del teléfono.

El controlador del teléfono tiene botones para ajustar la velocidad y pantallas para indicar la energía restante y el ajuste de velocidad