



Magnum Shop

Andador y carro
de la compra

MANUAL DE USUARIO

Ref. AALMAGNUMSHOP

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nuevo andador y carro de la compra **Magnum Shop**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de este.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 – Partes del andador	4
2 – Descripción del producto	4
3 – Características del producto	5
4 – Uso y montaje.....	6
5 – Mantenimiento y limpieza	7
6 – Seguridad y más información.....	8
7 – Garantía.....	9

1. PARTES DEL ANDADOR



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ANDADOR Y CARRO DE LA COMPRA

Compre con estilo, comodidad y seguridad con el nuevo andador y carro de compra **Magnum Shop**: una solución innovadora para aquellos que buscan comodidad, estilo, seguridad y practicidad en su vida diaria.

Cuenta con una amplia cesta de gran tamaño, con una capacidad de carga de 24 litros y un peso máximo de 15 kg. Además, incorpora una bolsa extraíble y lavable de gran tamaño en su interior.

Los tejidos utilizados en el andador **Magnum Shop** son de alta calidad, impermeables e ignífugos, brindando durabilidad y seguridad en su uso.

Con su robustez, diseño y comodidad, el andador y carro de compra **Magnum Shop** se convierte en el compañero ideal para salir a comprar con total seguridad y comodidad.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



MAGNUM SHOP



MAGNUM SHOP PLUS



INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	55 cm
Ancho entre ruedas traseras	40 cm
Profundidad total	68 cm
Alto total (regulable)	79 - 91 cm
Plegado (ancho x alto x prof.)	55 x 65 x 42 cm

Peso


Peso total	10,90 kg
Peso máximo soportado	136 kg

Material


Aluminio

Color

Color chasis	Negro mate
Color tejidos	Gris / Turquesa

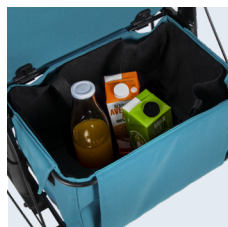

Cesta de gran capacidad

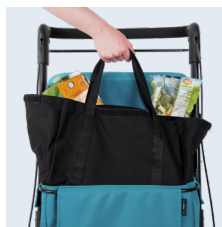

Bolsa interior extraíble

Asiento

Ancho del asiento (talla)	40 cm
Profundidad del asiento	32 cm
Alto del asiento al suelo	51 cm
Tipo de asiento	Abatible
Tipo de funda	Extraíble y lavable

Respaldo

Ancho del respaldo	40 cm
Alto del respaldo	17 cm
Tipo de respaldo	Abatible
Tipo de funda	Extraíble y lavable

Ruedas

Medidas ruedas	Ø20 cm
Ancho ruedas	3 cm
Tipo de ruedas	Macizas

Cesta exterior

Medidas	38 x 25 x 25 cm
Capacidad	24 l.
Peso máx. soportado cesta	15 kg
Tipo de cesta	Extraíble y lavable

Cesta interior

Tipo de cesta	Extraíble y lavable
Tipo de anclaje	Sujeción mediante 4 bandas de velcro

Otras características

Tipo de freno	Freno maneta / Freno bloqueo
Tipo de plegado	Ruedas abatibles con pomos de rápida extracción

4. USO Y MONTAJE

4.1. SAQUE EL ANDADOR DE LA CAJA

Antes de empezar, en la caja verá una bolsa con cuatro tornillos de perilla.



4.2. USO DEL DESPLEGADO

Paso 1: Baje ambas ruedas delanteras y fíjelas firmemente con dos tornillos de perilla, uno en cada extremo de la parte superior de la rueda.



Paso 2: Baje las ruedas traseras, presione la bola de aluminio para hacer el primer fijado y termine de fijarlas con los dos tornillos de perilla.



Paso 3 Coloque el mango de altura ajustable donde mejor le vaya, para cambiar la altura, presione en el pasador de bloqueo plateado, sabrá que la altura ha quedado completamente fija cuando vea el pasador entre uno de los ocho agujeros.



4.3. USO DE LOS FRENOS

Freno de servicio (al empujar): Tire de las palancas de freno hacia arriba.



Freno bloqueo (al estacionar y usar la función de asiento): Presione las palancas de freno hacia abajo.



4.4. USO DEL ASIENTO

Para abatir completamente el asiento, hecho el respaldo hacia atrás y podrá abrir la cesta.



4.5. USO DE LA AYUDA DE SUPERACIÓN DE OBSTÁCULOS

El andador tiene incorporado un sistema en las dos ruedas traseras que le ayudará a superar diferentes obstáculos, como bordillos u otros objetos.



4.6. COLOCACIÓN DE LA BOLSA EXTERIOR

Coloque la bolsa en la percha del andador y use el velcro para fijarlo en el marco. La solapa más larga se coloca en la parte frontal del marco.



4.6. COLOCACIÓN DE LA BOLSA INTERIOR

Coloque la bolsa interior extraíble dentro del andador y use el velcro para fijarlo.



4.7. INSTALACIÓN REPOSABRAZOS

Esta opción está disponible únicamente en el modelo **Magnum Shop Plus**. Para colocar los reposabrazos, extraiga los puños del andador y deslice el tubo del reposabrazos hasta que haga tope con el lateral. Los reposabrazos no tienen lado específico, por lo que pueden colocarse indistintamente a la izquierda o a la derecha.



5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Mantenimiento

La suciedad normal en las piezas de metal y plástico se puede eliminar con agentes de limpieza.

Compruebe el contenido de los agentes de limpieza y utilice únicamente productos adecuados para la limpieza y desinfección. No utilice disolventes o agentes de limpieza abrasivos a pesar de la estructura sólida y el uso de materiales resistentes y anticorrosivos, el andador está sujeto a desgaste, por lo tanto, se recomienda revisar el andador con regularidad (una vez al año como mínimo).

Dicho control debería comprender: Un control visual de todas las partes del marco: si han sido dobladas, dañadas, gastadas o corroídas y, en particular, un control de lo siguiente

- Estructura del andador.
- Barras de empuje, asas y correa.

- Mangos de freno y cables de freno.
- Horquillas y ruedas delanteras.
- Ruedas traseras frenadas.
- Asiento y dispositivo de bloqueo.
- Bolsa de compras.
- Compruebe si falta alguna pieza de montaje (por ejemplo, tuercas, tornillos, remaches...) y si funcionan y están bien apretados.
- Compruebe el funcionamiento de los frenos bajando la velocidad y frenando las ruedas.

Limpieza

La limpieza y desinfección deben realizarse a intervalos regulares. Use una solución jabonosa suave sin abrasivos.

Se pueden utilizar métodos estándar para la desinfección. No utilice equipos de inyección de vapor ni limpiadores para fregar o corrosivos.

6. SEGURIDAD Y MÁS INFORMACIÓN



PRECAUCIÓN

No usar el andador como silla de ruedas o silla de transporte.

- Solo usar el asiento para estar sentado y quieto.
- Nunca sentarse y empujar con los pies.
- No utilizar para subir o bajar escalas, escaleras mecánicas o cintas transportadoras.

Consulte siempre con su médico o terapeuta para determinar el uso y ajuste adecuado de la regulación de la altura para obtener el máximo apoyo y la correcta activación del freno.

Asegúrese que ambos pomos de ajuste de altura estén bien apretados y que los puños están a la misma altura. Pruebe la estabilidad antes de usarlo.

Asegúrese que el andador está completamente abierto, el asiento en posición y las bisagras desplegadas correctamente.

Comprobar que los ajustes de altura sean los correctos y que las ruedas se mueven libremente antes de utilizarlo.

Respete el límite de peso del producto.

Reemplace las ruedas cuando estén desgastadas o dañadas. Comprobar las ruedas delanteras semanalmente para detectar signos de daños.

Suspenda el uso del andador si comprueba que las ruedas están flojas y vuelva al lugar donde las compro para ajustarlo.

No exponer a temperaturas extremas (muy altas o muy bajas), humedad o que se moje, para evitar deformaciones de las piezas de plástico.

Todas las ruedas tienen que estar en contacto con el suelo a la hora de utilizar el andador para que esté equilibrado.

Para evitar que vuelque:

- No intente alcanzar objetos si tiene que moverse hacia adelante mientras esté sentado en el andador.
- No cuelgue nada en el andador.
- El respaldo debe estar siempre en su sitio y no está diseñado para soportar todo el peso corporal.
- Si quiere alcanzar o recoger algún objeto debe colocar ambos pies firmemente en el suelo.
- No añadir más peso al andador cuando esté sentado.
- No use el asiento si se encuentra en una pendiente o terreno irregular.
- La cesta tiene una capacidad de 5 Kg. Y los objetos no deben sobresalir de ella.
- Para frenar el andador temporalmente, presione hacia abajo las dos empuñaduras a la vez.

7. GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su numero de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

MAGNUM SHOP
IM BY TOTALCARE



MAGNUM SHOP
IM BY TOTALCARE



Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Representante Europeo.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Lote.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Referencia del producto.



Datos del fabricante.



Número de serie.



Fecha de fabricación.



Producto sanitario conforme con el MDR.

Manual de usuario

Andador y carro de la compra, **Magnum Shop**

V3 · 24/07/2024