

ergoflīx

ergoflix® vario – La silla que se adapta a ti

*3 pasos
para una
adaptación
óptima.*



ergoflix



Ajustes. Adaptación. Confort.

Gracias a sus múltiples opciones de ajuste, **ergoflix® vario** ofrece una experiencia personalizada en términos de confort, estilo de vida y libertad.

ergoflix® vario **se puede ajustar en solo tres sencillos pasos.** Los dos primeros ya consiguen un ajuste perfecto para más del 90 % de los usuarios. El tercer paso permite afinar el ajuste para satisfacer necesidades personales concretas.

Pasos 1 y 2

Ajuste estándar
en solo 15 minutos

Paso 3 (opcional)

Ajuste más fino
en solo 15 minutos

Tabla de medidas

ergoflix® vario está disponible en la talla M y puede ser usada, sin necesidad de más ajustes, por la mayoría de usuarios, es decir, aquellos que miden entre 165 y 185 cm de altura. Los valores de la tabla son orientativos. Los ajustes óptimos pueden variar según las proporciones de cada cuerpo.

Paso	Medida	S Altura corporal 155 – 170 cm	M Altura corporal 165 – 185 cm <i>[configuración estándar]</i>	L Altura corporal 180 – 195 cm	Total 155 – 195 cm	Tiempo de ajuste aproximado
1	Altura de asiento	520 mm	540 mm	560 mm	520 a 560 mm	8 min
	Profundidad de asiento	430 mm	440 mm	450 mm	430 a 450 mm	
2	Altura de los reposabrazos	220 a 300 mm	240 mm (Ajustable de 200 a 280 mm)	180 a 260 mm	180 a 300 mm	5 min
	Anchura de los reposabrazos	460 a 500 mm	480 mm (Ajustable de 460 a 500 mm)	460 a 500 mm	460 a 500 mm	
	Longitud de pierna	390 a 430 mm	430 mm (Ajustable de 410 a 450 mm)	430 a 470 mm	390 a 470 mm	2 min
3	Longitud de reposabrazos	380 a 400 mm	380 mm (Ajustable de 380 a 400 mm)	380 a 400 mm	380 a 400 mm	5 min
	Altura del respaldo	550 a 570 mm	550 mm (Ajustable de 530 a 570 mm)	530 a 550 mm	530 a 570 mm	10 min

Para efectuar los ajustes, se necesita lo siguiente:

- Para aflojar: Llave Allen del 4 y del 5.
- Para apretar: Llave dinamométrica con punta Allen de 4 y 5 mm.

Paso 1

Ajustar la altura y profundidad de asiento

Para ajustar la altura del asiento a las necesidades del usuario, debe tenerse en cuenta su estatura. Como orientación, recomendamos los siguientes ajustes, que pueden variar en función de las proporciones corporales de cada persona.

Estatura entre 155 y 170 cm: ajusta la altura de asiento a **520 mm**.

Estatura entre 165 y 185 cm: para este rango de altura, la altura de asiento viene ya preestablecida de fábrica a **540 mm** (configuración estándar).

Estatura entre 180 y 195 cm: ajusta la altura de asiento a **560 mm**.

El ajuste de la altura de asiento modifica automáticamente la profundidad del asiento.



Asiento más bajo y más corto

Configuración estándar

Asiento más alto y más largo

S

M


L



Aprox. 8
minutos

Cómo proceder:

- Con una llave Allen del 5, afloja en ambos lados los tornillos de la parte delantera y trasera.
- Sitúa el asiento a la altura deseada y aprieta los tornillos a 16 Nm.
El ajuste de la altura de asiento modifica automáticamente la profundidad del asiento.

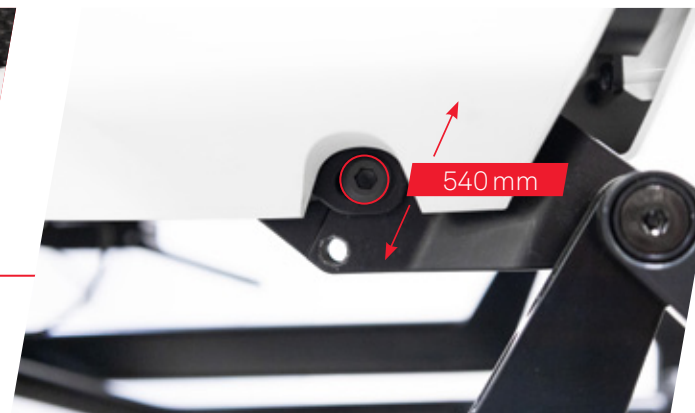

Paso 2

Ajustar los reposabrazos y plataforma reposapiés

Ajustar los reposabrazos:

La altura de los reposabrazos se puede ajustar en cinco posiciones, siendo los niveles 2 a 4 adecuados para la mayoría de usuarios.

Al ajustar la altura de los reposabrazos, también varía la distancia entre ellos: cuanto más altos se colocan los reposabrazos, mayor es el ancho útil del asiento.

Cómo proceder:

- Afloja los tornillos en ambos lados de la estructura del respaldo con una llave Allen del 5. Elige la altura deseada y aprieta los tornillos a 16 Nm.
- Afloja los tornillos del tubo en ambos lados y ajusta la altura para que coincida con la seleccionada en el paso anterior. A continuación, aprieta los tornillos con un par de 8 Nm.



Aprox. 5
minutos




Aprox. 2
minutos

Ajustar la plataforma reposapiés:

La plataforma reposapiés puede ajustarse en tres posiciones, con un recorrido total de 40 mm, para adaptarse a las necesidades del usuario. Para lograr una postura de sedestación ergonómica, las rodillas deben formar aproximadamente un ángulo recto. Esta posición se consigue combinando correctamente el ajuste de la altura del asiento y la posición de la plataforma reposapiés.

Cómo proceder:

- Afloja el tornillo situado en la parte inferior del reposapiés con una llave Allen del 5.
- Desliza la plataforma reposapiés hasta la posición deseada y aprieta el tornillo a 16 Nm.

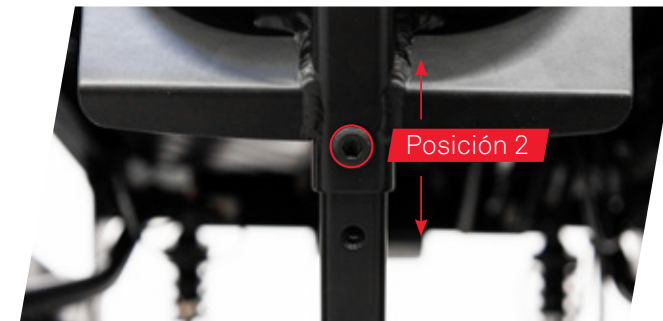

Información útil:

Con estos dos ajustes, la mayoría de los usuarios obtiene una configuración adecuada. Si es necesario realizar un ajuste más preciso, en el siguiente apartado se explica cómo hacerlo.

Paso 3


Ajustar la longitud de los reposabrazos y la altura del respaldo

Ajustar la longitud de los reposabrazos:

La longitud de los reposabrazos se puede aumentar 20 mm.

Cómo proceder:

- Levanta el reposabrazos pulsando el botón.
- Afloja el tornillo situado en la parte inferior trasera del reposabrazos con una llave Allen adecuada.
- Retira el tornillo situado en la parte inferior delantera del reposabrazos con una llave Allen adecuada.
- Sitúa el reposabrazos a la longitud deseada. Aprieta los tornillos a 8 Nm.
- Repite el procedimiento en el otro lado.

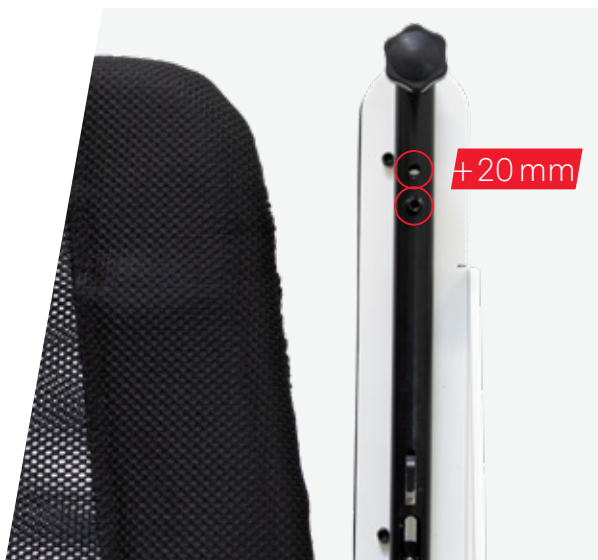

Aprox. 5 minutos


Ajustar la altura del respaldo:

La altura del respaldo, incluido el soporte lumbar, se puede ajustar en tres posiciones. En la posición intermedia (ajuste de fábrica), la altura del respaldo es de 550 mm, lo que lo convierte en uno de los respaldos más altos disponibles en el mercado de las sillas de ruedas eléctricas plegables.

Cómo proceder:

- Afloja los tornillos en el lado izquierdo y derecho del tubo del respaldo con una llave Allen del 5.
- Desliza el tubo hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la altura deseada. Utiliza las marcas del tubo como referencia. Aprieta los tornillos a 16 Nm.

Sugerencia: Retira la funda del respaldo para ajustar el soporte lumbar al nivel de tensión deseado.

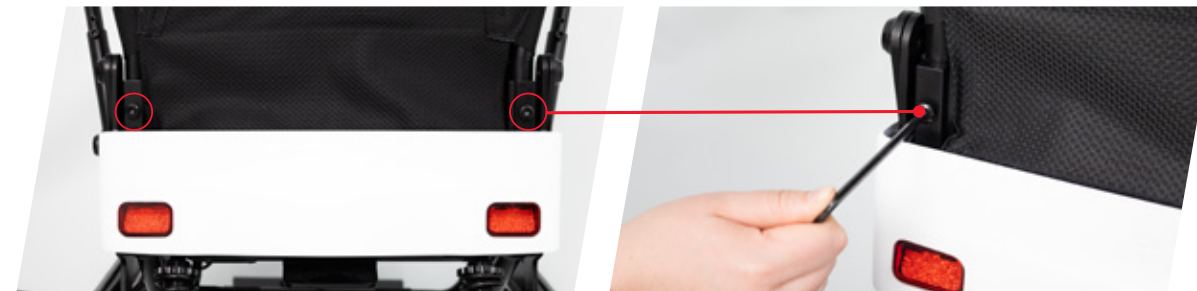

Aprox. 10 minutos

Ajustar la altura de los reposabrazos:

Si se ha modificado la altura del respaldo, comprueba también la altura de los reposabrazos y reajústala si es necesario. Para ello, sigue las instrucciones del Paso 2.

Opciones de ajuste adicionales

Para lograr aún más comodidad y ergonomía

Ajustar el ángulo del respaldo:

El respaldo se puede ajustar progresivamente hasta un ángulo de 15 grados.

En cualquier momento, el usuario puede realizar este ajuste fácilmente mientras está sentado.

Cómo proceder:

- Tira de la palanca situada a la izquierda, debajo de la superficie del asiento, y empujla hacia arriba.
- Apoya tu cuerpo suavemente contra el respaldo para ajustar el ángulo.
- Suelta la palanca para bloquear el respaldo en la posición deseada.



Ajustar la suspensión:

El sistema de suspensión de las ruedas traseras compensa eficazmente las irregularidades del terreno. Su dureza puede ajustarse en función del peso del usuario y ofrece un recorrido de suspensión de 35 mm.

Cómo proceder:

- Gira el disco de ajuste sobre la suspensión hasta obtener la dureza deseada.
- Asegúrate de ajustar ambas unidades de suspensión (izquierda y derecha) de la misma manera.
- Cuanto más se gire el disco hacia abajo, mayor será la dureza de la suspensión.



**ergoflix Group GmbH**

Marktstr. 20
46499 Hamminkeln
Teléfono: +49 2852 9459000
Fax: +49 2852 9459099
info@ergoflix.de

A Sunrise Medical® Brand

**Sunrise Medical S.L**

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.