
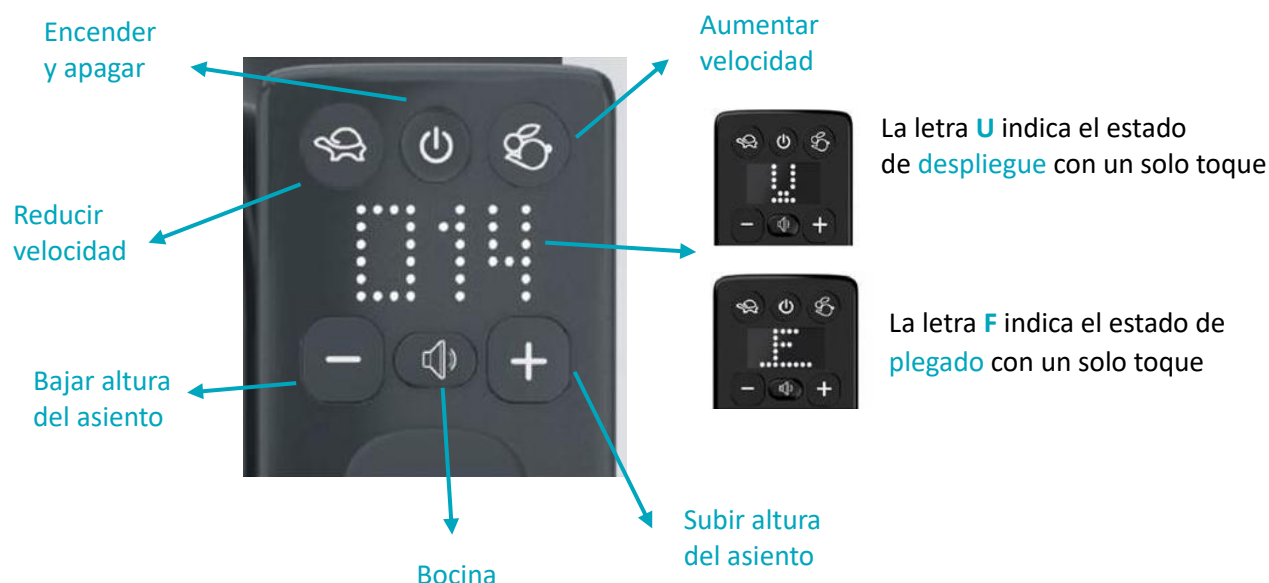


M4B Quick manual

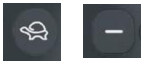

	Inclinación. Pulse los dos botones a la vez. El asiento se inclinará gradualmente hacia adelante.
	Reclinación. Pulse los dos botones a la vez y el asiento se reclinará gradualmente. (Rango de ajuste del ángulo del asiento: 0-20 grados.)
	Función despliegue. Mantenga pulsados simultáneamente los botones + y - durante unos 3 segundos para activar la función de despliegue con solo toque. En la pantalla aparecerá la letra U y la silla adoptará su posición estándar.
 	Función Bluetooth. Activar: Pulse simultáneamente los botones + y el altavoz. El LED superior izquierdo permanecerá encendido, lo que indica que el Bluetooth está activado. Desactivar: Pulse simultáneamente los botones - y el altavoz para desactivar la función.
	Modo normal. Adecuado para principiantes, con una velocidad máxima de 4km/h . La aceleración y desaceleración son relativamente suaves. Si el ángulo del asiento cambia de forma repentina y supera el umbral de seguridad, se reducirá automáticamente la marcha.
	Modo deportivo. Adecuado para usuarios experimentados con aceleración y desaceleración más rápidas. La velocidad máxima es de 6km/h .