


M4PRO Quick manual

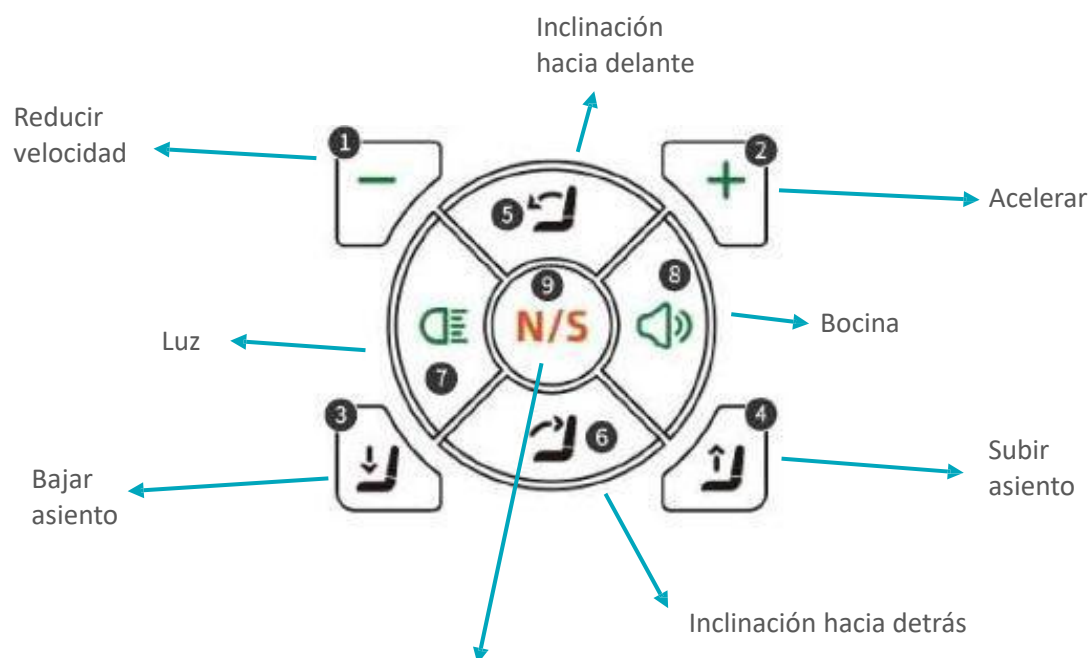

Pulsa brevemente para cambiar entre modo N y S.
Modo N: Modo normal para principiantes. La velocidad máxima es 4km/h.
Modo S: Modo deportivo para usuarios experimentados. Alcanza los 6km/h.

En ambos modos, si el cambio instantáneo en el ángulo del asiento o la altura de elevación del asiento supera el valor de protección, la silla de ruedas reducirá automáticamente la marcha.

	Plegado/desplegado del asiento: Mantenga pulsados los botones 3 y 4 simultáneamente para plegar y desplegar el asiento.  AVISO: los usuarios deben abandonar el asiento cuando utilicen las funciones de plegado o desplegado. No coloque objetos pesados sobre el asiento durante el funcionamiento.
	Bluetooth: Mantenga pulsados los botones 4 y 5 al mismo tiempo para activar o desactivar el Bluetooth.
 	Mando a distancia: Emparejamiento del mando a distancia inalámbrico: Mantenga pulsados los botones 1 y 4 simultáneamente durante 5 segundos e inicia el emparejamiento del mando a distancia inalámbrico Borrado del mando a distancia inalámbrico: Mantenga pulsados los botones 2 y 3 simultáneamente durante 5 segundos y borra el emparejamiento del mando a distancia inalámbrico.