



ASSEMBLY




OPERATION



COMFORT



MAINTENANCE

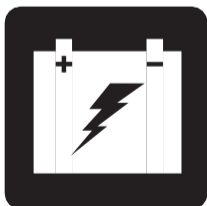

BATTERY
CHARGING



APEX ALUMALITE

BATERÍA DE LITIO

OWNER'S MANUAL

USO PREVISTO

El uso previsto de este dispositivo es proporcionar movilidad a personas limitadas a una posición sentada que tienen la capacidad para conducir una scooter.

NOTA: *Este manual de usuario se ha elaborado a partir de las especificaciones e información del producto más recientes disponibles en el momento de la publicación. Nos reservamos el derecho de realizar cambios cuando sean necesarios. Cualquier cambio en nuestros productos puede causar ligeras variaciones entre las ilustraciones y las explicaciones de este manual y el producto que ha comprado. La versión más reciente/actual de este manual está disponible en nuestro sitio web.*

NOTA: *Este producto cumple con las directivas y requisitos WEEE, RoHS y REACH. NOTA:*

Este producto cumple con la clasificación IPX4 (IEC 60529).

NOTA: *Travel Scooter y sus componentes no están hechos con látex de caucho natural. Consulte con el fabricante cualquier accesorio de repuesto tras la venta.*

Revisión del manual de
Apex Alupalite: Julio 2020



CONTENIDOS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	2
I. SEGURIDAD	3
II. SU TRAVEL SCOOTER	5
III. BATERÍAS Y CARGA	13
IV. MANEJO	18
V. AJUSTES DE COMODIDAD	20
VI. DESMONTAJE Y MONTAJE	22
VII. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS	24
VIII. CUIDADO Y MANTENIMIENTO	26

SEGURIDAD INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA Un proveedor autorizado o un técnico cualificado debe realizar la configuración inicial de esta scooter y debe realizar todos los procedimientos de este manual.

Los símbolos a continuación se utilizan en este manual de usuario y en la scooter para identificar advertencias e información importante. Es muy importante que los lea y los entienda completamente.



ADVERTENCIA Indica una condición/situación potencialmente peligrosa. El incumplimiento de los procedimientos designados puede causar lesiones personales, daños a los componentes o avería. En el vehículo, este icono se representa como un símbolo negro dentro de un triángulo amarillo con un borde negro.



OBLIGATORIO Estas acciones deben realizarse según lo especificado. El incumplimiento de las acciones obligatorias puede causar lesiones personales o daños al equipo. En el vehículo, este icono se representa como un símbolo blanco en un punto azul con un borde blanco.



PROHIBIDO Estas acciones están prohibidas. Estas acciones no deben realizarse en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia. Realizar una acción prohibida puede causar lesiones personales o daños al equipo. En el vehículo, este icono se representa como un símbolo negro con un círculo rojo y una barra roja.

I. SEGURIDAD

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Los siguientes símbolos se utilizan en la Travel Scooter para identificar advertencias, acciones obligatorias y acciones prohibidas. Es muy importante que los lea y comprenda completamente.

NOTA: Hay más advertencias identificadas y explicadas en la Guía de seguridad del consumidor que se incluye con su Travel Scooter. Familiarícese con todas las advertencias e información de seguridad que se encuentran en la Guía de seguridad del consumidor y consulte este recurso con frecuencia.



Lea y siga la información en el manual de usuario.



Etiqueta de información de la scooter



Cargue completamente las baterías antes de manejarla. Retire la llave de la Travel Scooter si va a estar desatendida.



Indica los puntos de amarre en la Travel Scooter.



No cumple con las normas ISO 7176-19 para el transporte ocupado en un vehículo motorizado. Cuando viaje dentro de un vehículo motorizado, no se sienta en su Travel Scooter.



Fabricado en

I. SEGURIDAD

GENERAL



OBLIGATORIO No maneje su nueva Travel Scooter por primera vez sin antes leer y comprender completamente este manual de usuario y la Guía de seguridad del consumidor.

Su Travel Scooter es un dispositivo de última tecnología que mejora la calidad de vida y está diseñado para aumentar la movilidad. Ofrecemos una amplia variedad de productos para adaptarnos mejor a las necesidades individuales del usuario de Travel Scooter. Tenga en cuenta que la elección final y la decisión de compra con respecto al tipo de Travel Scooter que se utilizará es responsabilidad del usuario de la Travel Scooter que sea capaz de tomar tal decisión y el profesional de la salud que le atienda normalmente (es decir, médico, fisioterapeuta, etc.).

El contenido de este manual se basa en la expectativa de que un experto en dispositivos de movilidad ha ajustado correctamente la Travel Scooter al usuario y ha ayudado al profesional sanitario prescriptor o al proveedor autorizado en el proceso de instrucción para el uso del vehículo.

Hay ciertas situaciones, incluidas algunas afecciones médicas, que conllevan que el usuario de la Travel Scooter deba practicar su conducción en presencia de un acompañante capacitado. Un acompañante capacitado se puede definir como un miembro de la familia o un cuidador profesional especialmente cualificado en ayudar a un usuario de la Travel Scooter en diversas actividades de la vida diaria.

A medida que comience a usar su Travel Scooter durante las actividades diarias, probablemente se enfrentará a situaciones para las que necesitará algo de práctica. Simplemente tómese su tiempo y pronto tendrá un control total y seguro mientras maniobra a través de puertas, entrando y saliendo de ascensores, subiendo o bajando rampas y sobre terreno moderado.

Puede encontrar información general adicional en las hojas de información complementaria y en los folletos incluidos en su Paquete del usuario. Lea y revise completamente la información y manténgala a mano para futuras consultas.

A continuación se presentan algunas precauciones, consejos y otras consideraciones de seguridad que le ayudarán a acostumbrarse a manejar la Travel Scooter de manera segura.

COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD ANTES DE CONDUCIR

Conozca la sensación de su Travel Scooter y sus prestaciones. Le recomendamos que realice una comprobación de seguridad antes de cada uso para asegurarse de que su Travel Scooter funciona sin problemas y de forma segura.

Realice las siguientes inspecciones antes de usar su Travel Scooter:

- Compruebe el estado de los neumáticos. Asegúrese de que no estén dañados o excesivamente desgastados.
- Compruebe todas las conexiones eléctricas. Asegúrese de que están apretadas y no oxidadas.
- Compruebe todas las conexiones del cableado. Asegúrese de que están bien fijadas.
- Revise los frenos para asegurarse de que funcionan correctamente.
- Compruebe el indicador del nivel de la batería para asegurarse de que las baterías están completamente cargadas.
- Asegúrese de que la palanca de rueda libre manual se encuentra en modo de conducción antes de sentarse en la Travel Scooter.

Si descubre algún problema, póngase en contacto con su proveedor autorizado para obtener ayuda. Consulte la información de contacto que se incluye en el Paquete del usuario.

II . SU TRAVEL SCOOTER

CONSOLA DEL MANILLAR

La consola del manillar alberga todos los controles necesarios para conducir su Travel Scooter, incluido el interruptor de llave, la palanca de control del acelerador, el botón del claxon, el dial de ajuste de velocidad y el indicador de nivel de la batería.



PROHIBIDO No exponga la consola del manillar a condiciones de humedad. En caso de que la consola del manillar se exponga a la humedad, no intente manejar su Travel Scooter hasta que la consola del manillar se haya secado completamente.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN PARA LAS FIGURAS 1 A 6

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Claxon | 7. Fusible de cargador externo |
| 2. Interruptor de llave | |
| 3. Indicador de nivel de la batería | |
| 4. Dial de ajuste de velocidad | |
| 5. Palanca de control del acelerador | |
| 6. Receptáculo del cable de alimentación del cargador (puerto del manillar)* | |

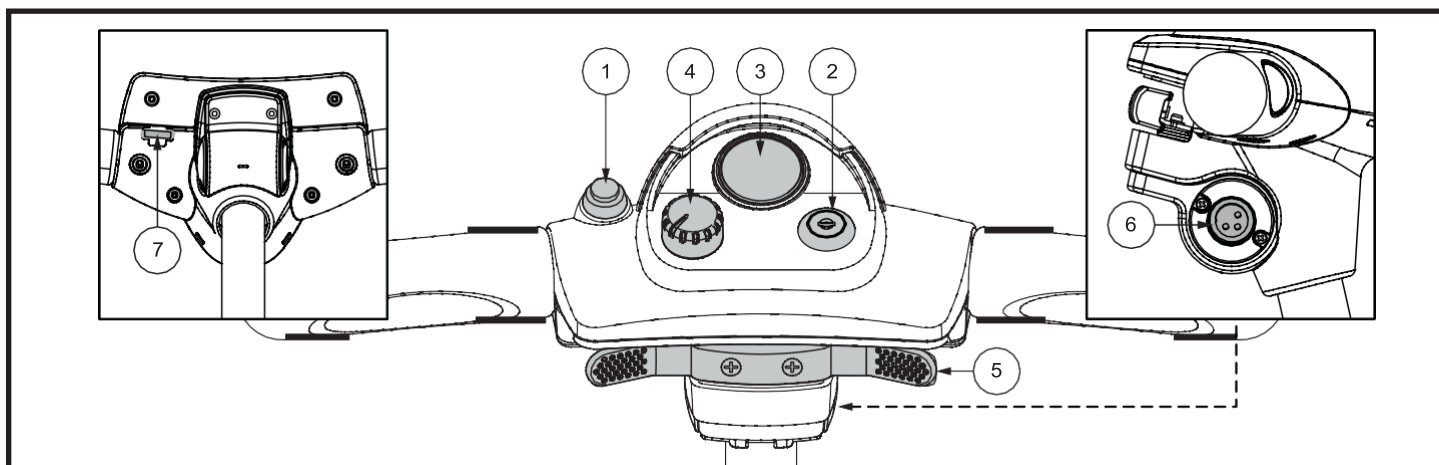


Figura 2. Consola del manillar

II . SU TRAVEL SCOOTER

Botón del claxon

Este botón activa un claxon de advertencia. Su Travel Scooter debe estar encendida para que el claxon esté operativo. No dude en usar el claxon de advertencia si al hacerlo puede evitar accidentes o lesiones.

Interruptor de llave

- Inserte la llave en el interruptor de llave y gírela en sentido horario para encender (arrancar) su Travel Scooter.
- Gire la llave hacia la izquierda para apagar (desconectar) su Travel Scooter.



ADVERTENCIA Ante una situación de emergencia, desconecte la llave para apagar la scooter. Hágalo con precaución. Tenga en cuenta que apagar la scooter puede hacer que esta se detenga bruscamente. Para soltar la parada de emergencia y restaurar la capacidad de conducción de la scooter, suelte la palanca de control del acelerador y luego conecte la llave de la scooter.

Aunque la llave se puede dejar en el interruptor de llave cuando se apaga la Travel Scooter, recomendamos retirarla para evitar un uso no autorizado de su Travel Scooter.



ADVERTENCIA Si la llave se gira a la posición de apagado mientras su Travel Scooter está en movimiento, los frenos electrónicos se activarán y su Travel Scooter se detendrá bruscamente.

Indicador de nivel de la batería

Cuando la llave se inserta por completo en el interruptor de llave y se gira en el sentido horario para encender la scooter, este indicador muestra la potencia aproximada de la batería. Para obtener más información sobre el indicador de nivel de la batería, consulte III. Baterías y carga.

Dial de ajuste de velocidad

Este dial le permite preseleccionar y limitar la velocidad máxima de su Travel Scooter.

- La imagen de la tortuga representa la configuración de velocidad más lenta.
- La imagen de la liebre representa la configuración de velocidad más rápida.

Palanca de control del acelerador

Esta palanca le permite controlar la velocidad de avance y de retroceso de su scooter hasta la velocidad máxima que establezca previamente con el dial de ajuste de velocidad.

II . SU TRAVEL SCOOTER

Para usar la palanca de control del acelerador:

Puede avanzar de cualquiera de las siguientes formas:

- Use el pulgar izquierdo para empujar el lado izquierdo de la palanca de control del acelerador.
- Use los dedos de la mano derecha para tirar hacia atrás en el lado derecho de la palanca de control del acelerador.

Puede retroceder de cualquiera de las siguientes formas:

- Use el pulgar derecho para empujar el lado derecho de la palanca de control del acelerador.
- Use los dedos de la mano izquierda para tirar hacia atrás en el lado izquierdo de la palanca de control del acelerador.

Suelte la palanca de control del acelerador y deje que la scooter se detenga por completo antes de mover el otro lado de la palanca. Cuando la palanca de control del acelerador se suelta por completo, vuelve automáticamente a la posición central de parada y activa los frenos de la scooter.

Interruptor de luces (si viene equipado)

Este interruptor controla el sistema de iluminación de su Travel Scooter.

- Mueva el interruptor hacia adelante para encender el sistema de iluminación.
- Mueva el interruptor hacia atrás para apagar el sistema de iluminación.



ADVERTENCIA Los usuarios de scooters deben usar las luces cuando la visibilidad es limitada, ya sea de día o de noche.

COMPONENTES TRASEROS

La palanca de rueda libre manual, las ruedas antivuelco y el conjunto de motor/eje transversal se encuentran en la Travel Scooter tal como se muestra (ver Figura 7).



ADVERTENCIA Antes de activar o desactivar el modo de rueda libre de su Travel Scooter, retire la llave del interruptor de llave. Nunca se siente en una Travel Scooter cuando esté en modo de rueda libre. Nunca active el modo de rueda libre de una Travel Scooter en una pendiente.

Conjunto de motor/eje transversal

El conjunto motor/eje transversal es una unidad electromecánica que convierte la energía eléctrica de las baterías de su Travel Scooter en energía mecánica controlada que impulsa las ruedas de la Travel Scooter.

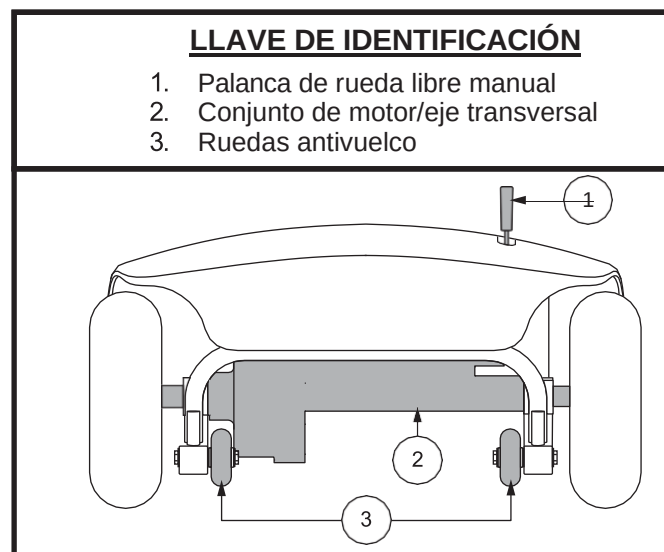


Figura 7. Componentes traseros

Palanca de rueda libre manual -

Siempre que necesite o desee empujar la Travel Scooter en una distancia corta, puede ponerla en modo de rueda libre.

1. Localice la palanca de rueda libre manual en la parte superior derecha de la sección trasera.
2. Empuje hacia adelante la palanca de rueda libre manual para desactivar el sistema de conducción y el sistema de frenos. Ahora puede empujar la Travel Scooter.
3. Empuje la palanca de rueda libre manual hacia atrás para volver a acoplar los sistemas de conducción y de frenos; esto desactiva el modo de rueda libre de la Travel Scooter.

II . SU TRAVEL SCOOTER


ADVERTENCIA Cuando su Travel Scooter está en modo de rueda libre, el sistema de frenado está desactivado.




- **Desactive el motor de propulsión únicamente si se encuentra en una superficie nivelada.**
- **Asegúrese de quitar la llave del interruptor de llave.**
- **Colóquese a un lado de la scooter para activar o desactivar el modo de rueda libre. Nunca se siente en la scooter para hacer esto.**
- **Una vez haya terminado de empujar su Travel Scooter, vuelva al modo de conducción para bloquear los frenos.**

LLAVE DE IDENTIFICACIÓN

1. Palancas de rueda libre manuales
2. Ruedas antivuelco

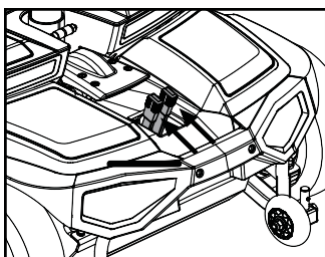

Modo de rueda libre (motor desactivado)

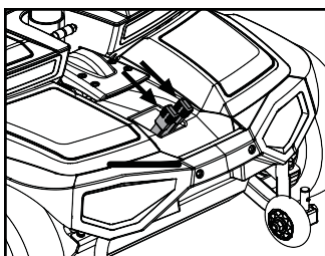

Modo de conducción (motor activado)

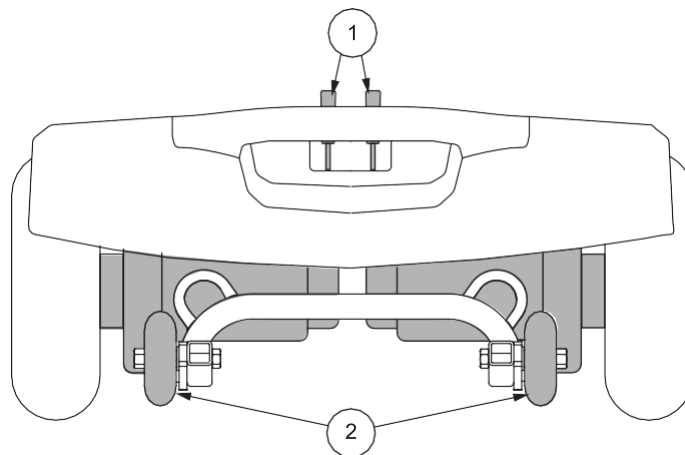


Figura 8. Componentes traseros

Palancas de rueda libre manuales -

Para su comodidad, la Travel Scooter tiene una palanca de rueda libre manual en el motor. Las palancas de rueda libre manuales le permiten deshabilitar el sistema de conducción para maniobrar la Travel Scooter manualmente. **Ver Figura 8.**



ADVERTENCIA No utilice la Travel Scooter mientras los motores de conducción están desactivados. No desactive los motores de conducción cuando la Travel Scooter esté en una pendiente, ya que la unidad podría rodar por sí sola. Solo active el modo de rueda libre cuando se encuentre en una superficie nivelada.



ADVERTENCIA Es importante recordar que cuando su Travel Scooter está en modo de rueda libre, el sistema de frenado está desactivado.

NOTA: Se recomienda encarecidamente que no cargue las baterías mientras esté en modo de rueda libre.

NOTA: Debe desconectar la alimentación antes de desactivar los sistemas de conducción; de lo contrario, la scooter puede mostrar un código de error. Para borrar este código, apague la scooter y active el modo de conducción. Luego arranque la scooter. El mensaje de error debería borrarse. De lo contrario, póngase en contacto con un proveedor autorizado.

II . SU TRAVEL SCOOTER

Para activar o desactivar el sistema de conducción:

1. Localice las palancas en la sección trasera de la scooter. **Ver Figura 8.**
2. Tire de las dos palancas hacia la parte trasera de la Travel Scooter para activar los motores de conducción (modo de conducción).
3. Empuje las dos palancas hacia la parte delantera de la Travel Scooter para desactivar los motores de conducción (modo de rueda libre).

Si le resulta difícil mover una palanca en cualquier dirección, mueva su Travel Scooter ligeramente hacia adelante y hacia atrás. La palanca deberá poder moverse a la posición deseada.



ADVERTENCIA No use las manillas de la palanca de rueda libre como puntos de amarre para inmovilizar el vehículo.

Ruedas antivuelco

Las ruedas antivuelco son una característica de seguridad integral e importante de su Travel Scooter. Están atornilladas al chasis en la parte trasera de la Travel Scooter.



PROHIBIDO No quite las ruedas antivuelco ni modifique su Travel Scooter de ninguna manera sin autorización de su proveedor.



ADVERTENCIA Las ruedas antivuelco pueden obstaculizar la transición suave de su Travel Scooter al subir o bajar un bordillo. Póngase en contacto con su proveedor autorizado para obtener más información.

Disyuntor principal (botón de reinicio)

Cuando baja el nivel de tensión de las baterías de su Travel Scooter o esta se ha forzado mucho debido a cargas excesivas o pendientes pronunciadas, el disyuntor principal puede activarse para proteger el motor y la electrónica frente a posibles daños. **Ver Figura 9.**

- El botón de reinicio del disyuntor principal aparece cuando se activa el disyuntor.
- Cuando se activa el interruptor, todo el sistema eléctrico de su Travel Scooter se apaga.
- Espere un minuto o dos para que la electrónica de su Travel Scooter «descanse».
- Pulse el botón de reinicio para reiniciar el disyuntor principal.
- Si el disyuntor principal se activa con frecuencia, es posible que deba cargar las baterías con más frecuencia. También puede ser necesario que su proveedor autorizado realice una prueba de carga en las baterías de su scooter.
- Si el disyuntor principal se activa repetidamente, pida ayuda a su proveedor autorizado.

II . SU TRAVEL SCOOTER




BATERÍA

Su Travel Scooter está equipada con una batería innovadora y fácil de extraer. Un asa en la parte superior de la batería hace que sea fácil levantarla con una mano. La batería contiene una batería recargable y puede contener el receptáculo del cable de alimentación del cargador, el disyuntor principal (botón de reinicio) y el fusible de la batería. **Ver Figuras 9 y 10.**

LLAVE DE IDENTIFICACIÓN


- | | |
|---|--|
| 1. Batería | 5. Disyuntor principal (botón de reinicio) |
| 2. Asa de la batería | 6. Terminales de la batería |
| 3. Receptáculo del cable de alimentación del cargador | 7. Fusible de la consola del manillar |
| 4. Fusible de la batería | |

Pack Alupalite

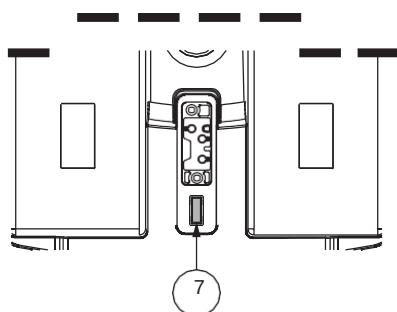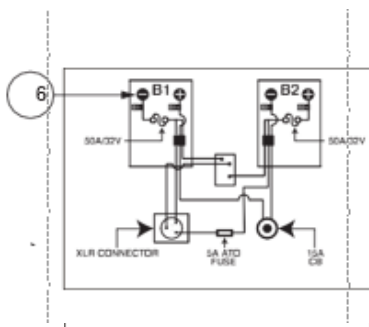
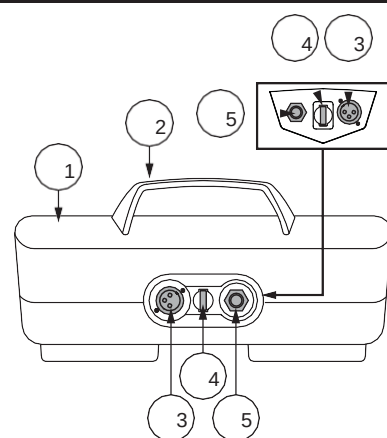


(Cubierta de Travel Scooter)




Baterías estilo B

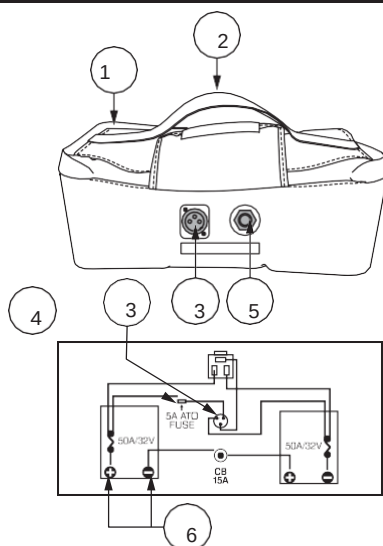

Batería estilo C

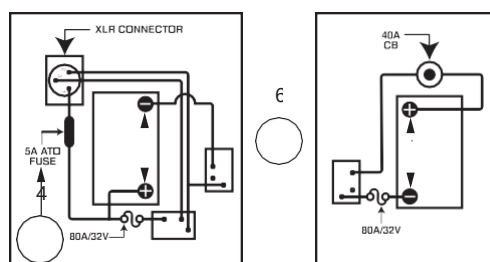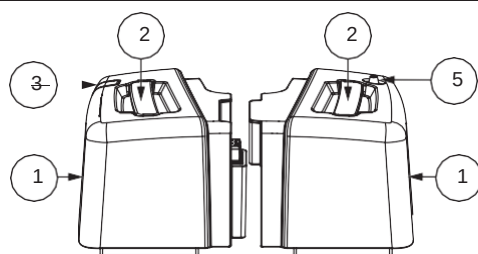

Baterías estilo D

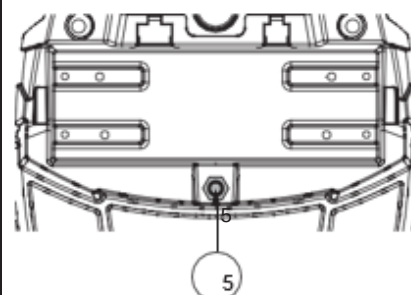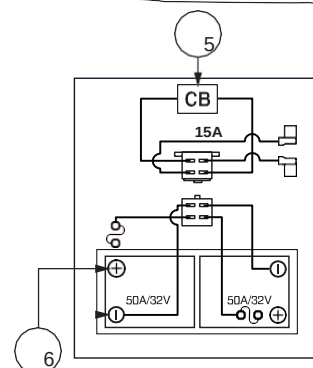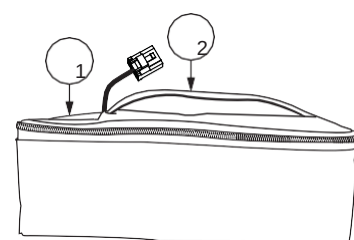

(Cubierta de Travel Scooter)

Figura 9. Batería

II . SU TRAVEL SCOOTER

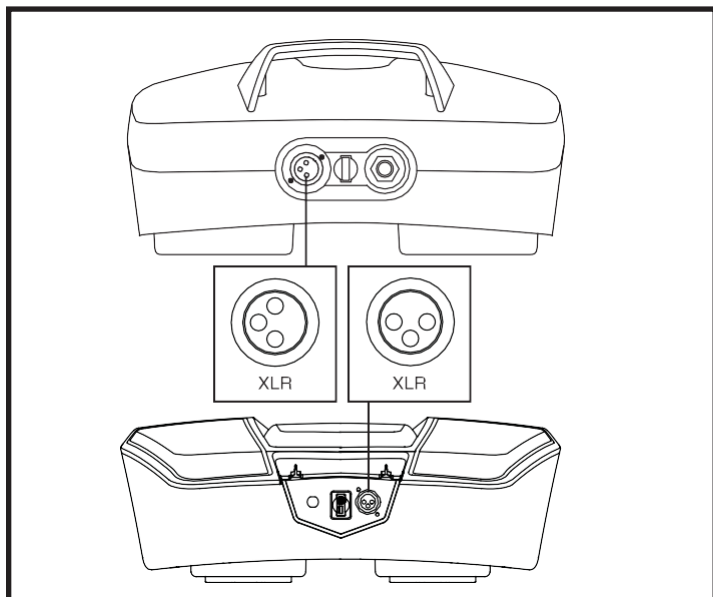


Figura 12. Receptáculo del cable de alimentación del cargador (batería)

Receptáculo del cable de alimentación del cargador
El extremo de 3 clavijas del cable de alimentación del cargador se conecta a este receptáculo. Ver Figuras 11 y 12.

Fusible de consola del manillar (si viene equipado)
El fusible ubicado debajo de la batería protege la electrónica de la consola del manillar. Ver Figura 9. En caso de que algún componente de la consola del manillar no responda, revise este fusible. Ver VII. Solución de problemas básicos para leer las instrucciones sobre el reemplazo de fusibles.

Cargador de batería externo

El cargador de batería externo carga la batería de Travel Scooter cuando está enchufado en el receptáculo del cable de alimentación del cargador y una toma de corriente estándar. Ver Figura 13.

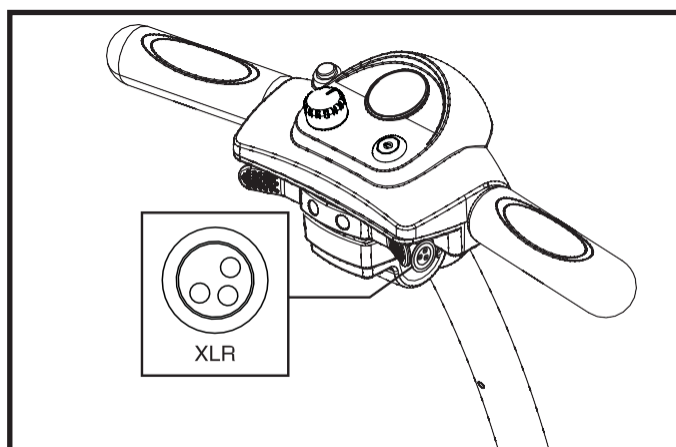


Figura 11. Receptáculo del cable de alimentación del cargador (montado en el manillar)

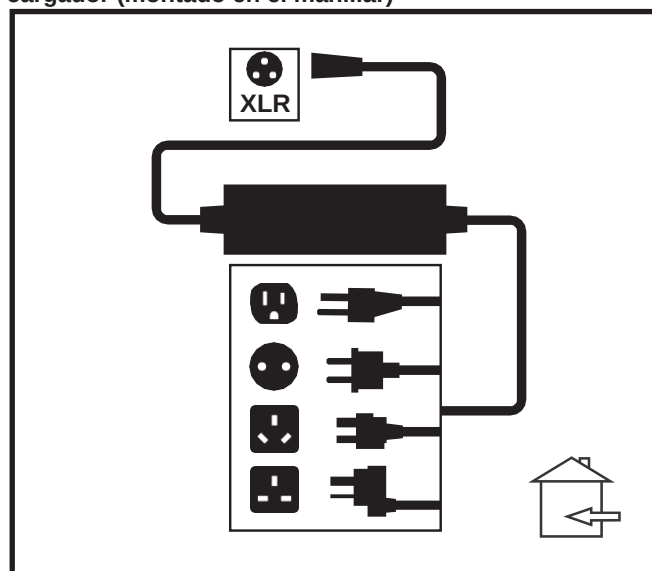


Figura 13. Cargador de batería externo

II . SU TRAVEL SCOOTER

PUNTOS DE AMARRE

Sujete siempre la Travel Scooter en una posición orientada hacia adelante. Sujete las cuatro correas de amarre a los puntos de amarre designados. **Ver Figura 14.** Apriete las correas para eliminar cualquier holgura. Nunca fije las correas a piezas ajustables, móviles o extraíbles de la Travel Scooter, como reposabrazos, protectores y ruedas. Estas partes podrían extraerse. Coloque los puntos de anclaje para las correas de amarre traseras directamente detrás de los puntos de amarre traseros en la Travel Scooter. Las correas de amarre delanteras deben anclarse a los puntos del suelo que están más espaciados que la Travel Scooter para proporcionar una mayor estabilidad lateral.



ADVERTENCIA Asegúrese de que la Travel Scooter esté bien fijada al vehículo motorizado durante el transporte. Las scooters que no estén debidamente fijadas pueden convertirse en un peligro para el usuario y para otros pasajeros del vehículo en caso de accidente, parada repentina o desvío, ya que la Travel Scooter podría volcar o desplazarse.

LLAVE DE IDENTIFICACIÓN

1. Puntos de amarre frontal
2. Puntos de amarre trasero

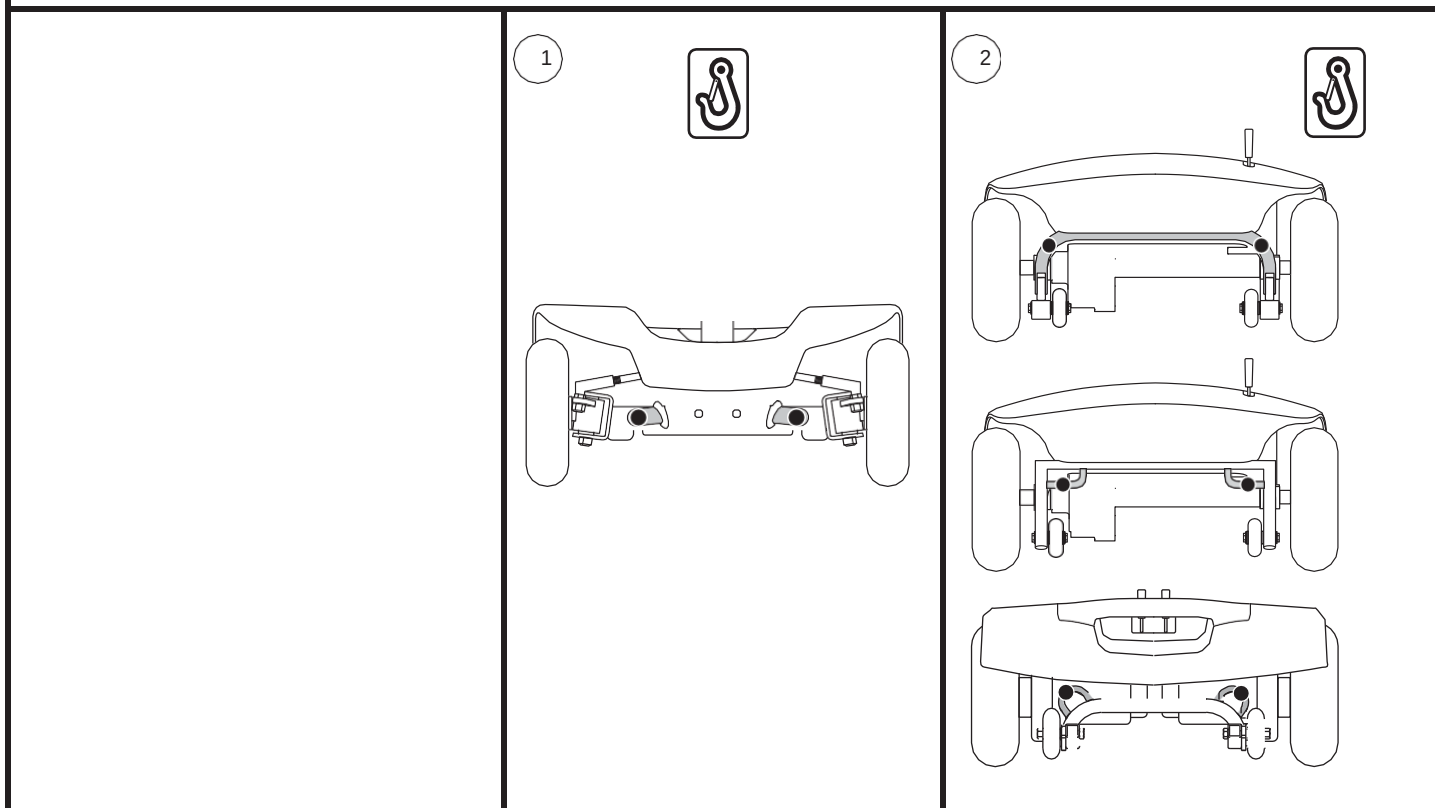


Figura 14. Puntos de amarre (identificados con puntos negros)

Baterías y carga

Su scooter utiliza una batería de iones de litio de larga duración. Esta batería está precintada y no requiere mantenimiento. Como está precintada, no es necesario verificar el nivel de electrolito (líquido). Las baterías de iones de litio están diseñadas para controlar una descarga más larga y profunda. Aunque tienen una apariencia similar a las baterías de automóviles, no son intercambiables. Las baterías de automóviles no están diseñadas para controlar una descarga larga y profunda, y no son seguras para su uso en scooters.



OBLIGATORIO Use gafas y guantes cuando manipule las baterías y lávese las manos después.



ADVERTENCIA Póngase en contacto con su proveedor de Pride autorizado si tiene alguna pregunta sobre la batería de su scooter.

Carga de la batería

El cargador de la batería es esencial para proporcionar una larga vida útil a la batería de su scooter. Está diseñado para optimizar el rendimiento de su scooter al cargar la batería de manera segura, rápida y fácil. El cargador de batería solo funciona cuando el cable de alimentación del cargador está enchufado a una toma de corriente.



PROHIBIDO La extracción del terminal a tierra puede crear un peligro eléctrico. Si es necesario, instale debidamente un adaptador aprobado triple en una toma de corriente que tenga acceso doble.



PROHIBIDO No use nunca un alargador para enchufar el cargador de la batería. Enchufe el cargador directamente a una toma de corriente estándar con un cable adecuado.



PROHIBIDO No permita que niños sin supervisión jueguen cerca de la scooter mientras la batería se está cargando. Pride recomienda que no cargue la batería mientras la scooter está ocupada.



OBLIGATORIO Lea las instrucciones de carga de la batería en este manual y en el manual suministrado con el cargador de la batería antes de cargar la batería.



ADVERTENCIA Se pueden generar gases explosivos mientras se carga la batería. Mantenga la scooter y el cargador de la batería lejos de fuentes de ignición, como llamas o chispas, y ventile adecuadamente cuando cargue la batería.

ADVERTENCIA Debe recargar la batería de su scooter con el cargador externo suministrado. No utilice un cargador de batería especial para automóviles.

ADVERTENCIA Inspeccione el cargador de la batería, el cableado y los conectores en busca de daños antes de cada uso. Póngase en contacto con su proveedor de Pride autorizado si encuentra daños.



ADVERTENCIA No intente abrir la carcasa del cargador de la batería. Si el cargador de la batería no parece funcionar correctamente, comuníquese con su proveedor autorizado de Pride.

ADVERTENCIA Tenga en cuenta que la carcasa del cargador de la batería puede calentarse durante la carga. Evite el contacto con la piel y no la coloque sobre superficies que puedan verse afectadas por el calor.

ADVERTENCIA Si el cargador de la batería está equipado con ranuras de enfriamiento, no intente insertar objetos a través de estas ranuras.


ADVERTENCIA Si su cargador de la batería no ha sido analizado y aprobado para uso en exteriores, no lo exponga a condiciones climáticas adversas o extremas. Si se expone el cargador de batería a condiciones climáticas adversas o extremas, debe dejar que se adapte a la diferencia de condiciones ambientales antes de usarlo en interiores. Consulte el manual suministrado con el cargador de la batería para obtener más información.



NOTA: La batería de la scooter se puede cargar con la caja de la batería instalada o extraída de la scooter.

Para cargar la batería con el cargador externo:

1. Coloque su scooter junto a una toma de corriente estándar.
2. Asegúrese de que la scooter está apagada.
3. Conecte el cargador externo a la toma del cargador externo de la batería de la scooter. **Ver Figura 12.**
4. Conecte el cargador externo a la toma de corriente.
5. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador externo de la toma de corriente y luego de la scooter.

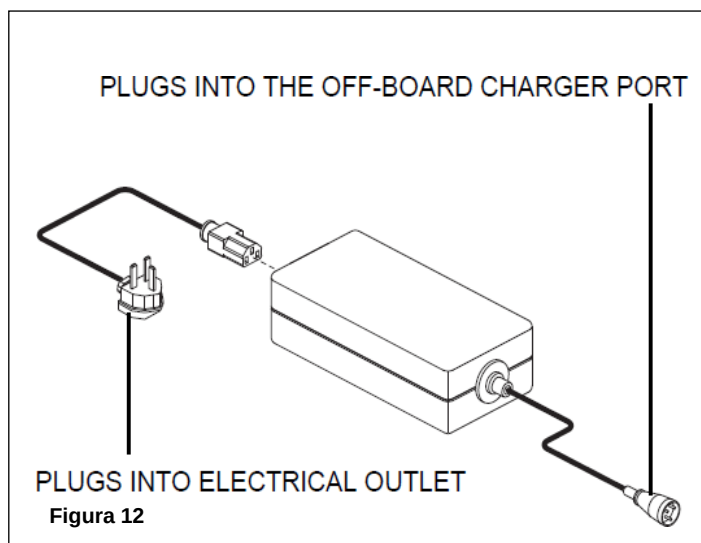

ADVERTENCIA El color de la luz led en el cargador indica un estado diferente del cargador. El led se muestra **ROJO** cuando el cargador no está conectado a la scooter o no puede conectarse. El led se muestra **NARANJA** cuando el cargador está conectado y está cargando la scooter. El led se muestra **VERDE** cuando la scooter ha finalizado la carga.



Nota: El led siempre debe ser naranja cuando se enchufa la scooter. Si el led se pone inmediatamente **VERDE**, puede significar que la batería está demasiado descargada para permitir la carga o que hay problema con su cargador. En este caso, comuníquese con su proveedor de servicios de Pride para recibir asesoramiento.

NOTA: El indicador de nivel de la batería de su scooter muestra una lectura aproximada de la carga de la batería. Consulte la Tabla 1 para ver los códigos del indicador de nivel de la batería.

Ledes	Porcentaje de batería
10	91-100 % de batería restante
9	81-90 % de batería restante
8	71-80 % de batería restante
7	61-70 % de batería restante
6	51-60 % de batería restante
5	41-50 % de batería restante
4	31-40 % de batería restante
3	21-30 % de batería restante
2	11-20 % de batería restante
1	< 10 % de batería restante
Primer led parpadeando	< 5 % de batería restante

Tabla 1. Códigos del indicador de nivel de la batería (tenga en cuenta que estos valores son estimaciones)

Para cargar la batería con la batería extraída de la scooter:

1. Retire la batería de la scooter.
Ver Figura 4.
2. Coloque la batería junto a una toma de corriente estándar.
3. Enchufe el cargador externo en el puerto del cargador de la batería. **Ver Figura 13.**
4. Conecte el cargador externo a la toma de corriente.
5. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador externo de la toma de corriente y luego de la batería.
6. Vuelva a instalar la batería en la scooter.

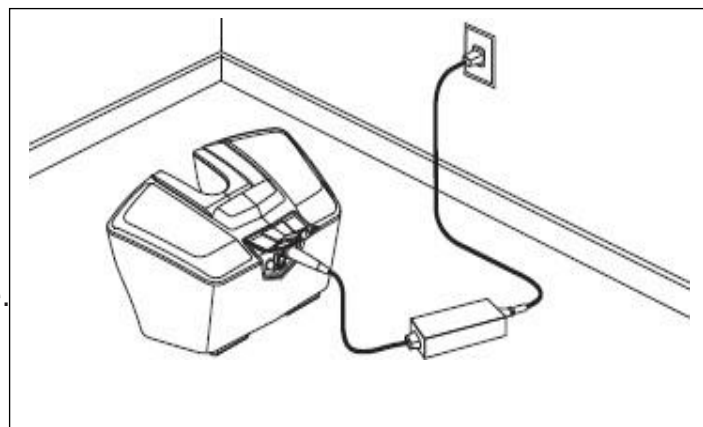


Figura 13. Carga de la batería con la batería extraída

NOTA: Apague la scooter antes de extraer la batería.

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona el cargador?

El cargador de la batería toma la tensión de la toma de corriente estándar (corriente alterna) y lo convierte a 24 V CC (corriente continua). La batería utiliza una corriente continua para hacer funcionar su scooter. Cuando la tensión de la batería tiene un nivel bajo, el cargador hace un esfuerzo mayor para cargar la batería. A medida que la tensión de la batería se acerca a la carga completa, el cargador no hace tanto esfuerzo para completar el ciclo de carga. Cuando la batería está completamente cargada, el amperaje del cargador es casi cero. Así es como el cargador mantiene una carga pero no sobrecarga la batería.

¿Puedo usar otro cargador de batería?

Debe usar el cargador suministrado con la scooter. Es la herramienta más segura y eficiente para cargar la batería. No recomendamos utilizar otros tipos de cargadores (como un cargador de batería para automóviles).

NOTA: El cargador de su scooter no funcionará después de que la batería se haya descargado a una capacidad casi nula. Si esto sucede, llame a un proveedor de Pride autorizado para obtener ayuda.

¿Con qué frecuencia debo cargar la batería?

Muchos factores entran en juego a la hora de decidir con qué frecuencia debe cargar la batería. Puede usar su scooter todo el día a diario o puede no usarla durante semanas.

■ Uso diario

Si usa su scooter diariamente, cargue la batería tan pronto como termine de usarla. Su scooter estará lista cada mañana para prestarle servicio durante una jornada completa. Se recomienda cargar la batería al menos 8 a 14 horas después de un uso diario. Pride recomienda cargar la batería durante 4 horas adicionales después de que el cargador de batería indique que la carga se ha completado.

■ Uso poco frecuente

Si usa su scooter con poca frecuencia (una vez por semana o menos), debe cargar la batería al menos una vez por semana durante 12 a 14 horas.

NOTA: Mantenga su batería totalmente cargada y evite descargarla completamente. Consulte el manual suministrado con el cargador de la batería para leer las instrucciones de carga.

¿Cómo puedo conseguir el alcance o la distancia máxima por carga?

Rara vez se presenta una situación de conducción ideal, como un terreno liso, plano y duro sin viento, pendientes o curvas. Lo más habitual es que se presenten pendientes, grietas en el pavimento, superficies irregulares y poco compactas, curvas y viento. Todos estos factores afectarán a la distancia o el tiempo de funcionamiento por carga de batería. A continuación indicamos algunas sugerencias para obtener el rango máximo por carga:

- Cargue siempre la batería completamente antes de su viaje.
- Planifique su viaje con antelación para evitar pendientes si es posible.
- Limite el peso del equipaje a los artículos esenciales.
- Trate de mantener una velocidad uniforme y evite conducir de forma intermitente.

¿Qué tipo de batería debo usar?

Recomendamos la batería de iones de litio suministrada por Pride precintada y que no requiere mantenimiento. Consulte la tabla de especificaciones para obtener más información sobre la batería que utiliza su scooter.



ADVERTENCIA Productos químicos corrosivos contenidos en las baterías. Use solo baterías de iones de litio para reducir el riesgo de fugas o condiciones explosivas.

¿Por qué mi nueva batería parece deficiente?

Al igual que las baterías de níquel-cadmio, las baterías de iones de litio tienen un efecto «memoria». Las baterías de iones de litio están diseñadas específicamente para proporcionar energía, agotar su carga y luego aceptar una recarga relativamente rápida. Si las baterías se recargan continuamente después de haberse descargado solo parcialmente, pierden su capacidad de mantener una carga completa.

Trabajamos en estrecha colaboración con nuestro fabricante de baterías para proporcionar la batería que mejor se adapte a las demandas específicas de la scooter. Las baterías nuevas llegan periódicamente a Pride y se envían rápidamente con una carga completa. Durante el envío, la batería experimenta temperaturas extremas que pueden influir en el rendimiento inicial. El calor reduce la carga de la batería, y el frío reduce la potencia disponible y prolonga el tiempo necesario para recargar la batería (como ocurre con la batería de un automóvil).

La temperatura de la batería puede tardar varios días en estabilizarse y ajustarse a la nueva temperatura ambiente. Más importante aún, le llevará unos cuantos «ciclos de carga» (una descarga completa, luego una carga completa) establecer el equilibrio químico crítico que es esencial para el rendimiento máximo de la batería y su larga vida útil. Vale la pena tomarse el tiempo necesario para hacer funcionar la batería correctamente.

¿Cómo puedo garantizar la máxima duración de la batería?

Una batería completamente cargada proporcionará un rendimiento fiable y una mayor duración. Mantenga la batería de su scooter completamente cargada siempre que sea posible. Las baterías que se cargan con poca frecuencia, se cargan repetidamente después de una descarga parcial o se guardan sin una carga completa pueden quedar dañadas de forma permanente, lo que provoca un funcionamiento poco fiable de la scooter y una vida útil limitada.

NOTA: La vida útil de una batería es a menudo un reflejo de la atención que recibe.

¿Cómo debo guardar mi scooter y su batería?

Si no usa su scooter con regularidad, le recomendamos mantener la energía de la batería cargándola al menos una vez por semana.

Si no tiene pensado usar su scooter durante un periodo prolongado, cargue completamente la batería antes de guardarla. Desconecte la batería y guarde la scooter en un ambiente cálido y seco. Evite temperaturas extremas, como heladas y ambientes excesivamente calurosos, y nunca intente cargar una batería congelada. Una batería fría o congelada debe templarse durante varios días antes de recargarla.

¿Qué pasa con el transporte público?

Las baterías de iones de litio suministradas por Pride están diseñadas para su aplicación en scooters y otros vehículos de movilidad. El transporte del vehículo en un avión comercial está sujeto a las normativas gubernamentales y a la política de la aerolínea. Le sugerimos que se comunique con la aerolínea con antelación para conocer los requisitos específicos de la misma y asegurarse de que tanto la scooter como su batería de iones de litio están permitidas.

¿Qué pasa con el envío?

Si desea utilizar una empresa de transporte para enviar la scooter a su destino, vuelva a empaquetar la scooter en el contenedor de envío original si es posible y envíe la batería en una caja separada.

IV. MANEJO

ANTES DE SUBIRSE A SU TRAVEL SCOOTER

- ¿Ha cargado completamente la batería? Ver III. Baterías y carga.
- ¿Está la palanca de rueda libre manual en la posición de conducción (hacia atrás)? Nunca deje la palanca de rueda libre manual en la posición hacia adelante a menos que esté empujando manualmente su Travel Scooter.
- Asegúrese de que el botón de bloqueo del manillar esté en posición de desbloqueo. Ver VI. Desmontaje y montaje.
- Asegúrese de que la temperatura ambiente se encuentra entre -25 °C y 50 °C.

AL SUBIRSE A SU TRAVEL SCOOTER

1. Asegúrese de que la llave no está insertada en el interruptor de llave.



ADVERTENCIA Nunca intente subir o bajar de su Travel Scooter sin extraer primero la llave del interruptor de llave. Esto evitará que la Travel Scooter se desplace si se mueve accidentalmente la palanca de control del acelerador.

2. Colóquese al lado de su Travel Scooter.
3. Desbloquee la palanca de rotación del asiento y gire el asiento hasta que quede frente a usted.
4. Asegúrese de que el asiento esté fijado a su posición.
5. Colóquese de manera cómoda y segura en el asiento.
6. Desbloquee la palanca de rotación del asiento y gire el asiento hasta que mire al frente.
7. Asegúrese de que el asiento esté fijado a su posición.
8. Cerciórese de que los pies están seguros en el suelo de la scooter.

AJUSTES Y COMPROBACIONES ANTES DE CONDUCIR

- ¿Está el asiento a la altura adecuada? Ver V. Ajustes de comodidad.
- ¿Está el asiento fijo en su posición?
- ¿Está el manillar en un lugar cómodo y fijo en su posición? Ver V. Ajustes de comodidad.
- ¿Está la llave completamente insertada en el interruptor de llave y girada en el sentido horario a la posición de encendido?
- ¿Funciona correctamente el claxon de la Travel Scooter?
- ¿Está el camino previsto libre de personas, mascotas y obstáculos?
- ¿Ha planificado su ruta para evitar terrenos adversos y todas las pendientes posibles?

NOTA: Tenga cuidado al manejar su scooter en superficies delicadas, ya que pueden producirse roces o marcas.

MANEJO DE SU TRAVEL SCOOTER



ADVERTENCIA Las siguientes acciones puede afectar negativamente a la dirección y la estabilidad mientras conduce su Travel Scooter:

- Agarrar o atar una correa para pasear a su mascota.
- Transportar pasajeros (incluidas mascotas).
- Colgar cualquier artículo del manillar.
- Remolcar o ser empujado por otro vehículo motorizado.

ADVERTENCIA Mantenga ambas manos en el manillar y los pies en el suelo de la scooter en todo momento mientras maneja su Travel Scooter. Esta posición de conducción le brinda el mayor control posible sobre su vehículo.

- Establezca el dial de ajuste de velocidad a la velocidad deseada.
- Presione su pulgar contra el lado apropiado de la palanca de control del acelerador.
- El disco de freno de estacionamiento electromecánico se desbloquea automáticamente y la Travel Scooter acelera suavemente a la velocidad que haya seleccionado previamente con el dial de ajuste de velocidad.
- Tire de la empuñadura izquierda para dirigir su Travel Scooter hacia la izquierda.
- Tire de la empuñadura derecha para dirigir su Travel Scooter hacia la derecha.
- Mueva el manillar a la posición central para conducir en línea recta.
- Para detenerse, suelte lentamente la palanca de control del acelerador. Los frenos electrónicos se activarán automáticamente cuando su Travel Scooter se detenga.

IV. MANEJO

NOTA: La velocidad de retroceso de su Travel Scooter es más lenta que la velocidad de avance que establezca previamente con el dial de ajuste de velocidad.

AL BAJARSE DE SU TRAVEL SCOOTER

1. Detenga su Travel Scooter por completo.
2. Extraiga la llave del interruptor de llave.



ADVERTENCIA Nunca intente subir o bajar de su Travel Scooter sin extraer primero la llave del interruptor de llave. Esto evitará que la Travel Scooter se desplace si se mueve accidentalmente la palanca de control del acelerador.

3. Desbloquee la palanca de rotación del asiento y gire el asiento hasta que mire a un lado de la scooter.
4. Asegúrese de que el asiento esté fijado a su posición.
5. Salga del asiento con cuidado y de forma segura y colóquese a un lado de su Travel Scooter.
6. Puede dejar el asiento hacia un lado para que sea más rápido montarse en su Travel Scooter la próxima vez.

FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR DE APAGADO

Su Travel Scooter está equipada con una función de temporizador de apagado automático de ahorro de energía diseñada para preservar la duración de la batería de su Travel Scooter. Si por error deja la llave en el interruptor de llave y en la posición de encendido, pero no utiliza la scooter en aproximadamente 20 minutos, el controlador de la scooter se apaga automáticamente.

Si se activa la función del temporizador de apagado, realice los siguientes pasos para reanudar el funcionamiento normal.

1. Extraiga la llave del interruptor de llave.
2. Vuelva a insertar la llave y arranque su Travel Scooter.

AJUSTE DEL ÁNGULO DEL MANILLAR (Ver Figura 23)

ADVERTENCIA Retire la llave del interruptor de llave antes de ajustar el manillar o el asiento. Nunca intente ajustar el manillar o el asiento mientras la Travel Scooter está en movimiento.



ADVERTENCIA Antes de manejar la scooter, tire y empuje del manillar para asegurarse de que el mecanismo de ajuste del ángulo está fijo. Inspeccione el pomo de ajuste del manillar y el mecanismo de ajuste del ángulo para asegurarse de que están completamente bloqueados. Si nota movimiento en el manillar, compruebe si el pomo de ajuste del manillar está completamente apretado.

NOTA: Para bajar completamente el manillar, primero debe extraer el asiento y la batería. Retire el asiento tirando hacia arriba y hacia afuera de la Travel Scooter.

AJUSTE DE ROTACIÓN DEL ASIENTO

La palanca de rotación del asiento, ubicada en el lado derecho de la base del asiento, lo inmoviliza en varias posiciones. Ver **Figura 24**.

1. Tire hacia arriba de la palanca de rotación del asiento para desbloquear el asiento.
2. Gire el asiento a la posición deseada.
3. Suelte la palanca para fijar el asiento en su lugar.

AJUSTE DEL ANCHO DEL REPOSABRAZOS

El ancho del reposabrazos se puede ajustar hacia adentro o hacia afuera.

1. Afloje los pomos de ajuste del reposabrazos. Ver **Figura 24**.
2. Use el anillo adjunto para tirar y extraer los pasadores de retención.
3. Deslice los reposabrazos hacia adentro o hacia afuera hasta el ancho deseado.
4. Alinee los orificios de ajuste en la estructura del asiento y el reposabrazos y, a continuación, vuelva a insertar los pasadores de retención.
5. Apriete las pomos de ajuste del reposabrazos.

AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASIENTO

El asiento puede colocarse a diferentes alturas. Ver **Figura 25**.

1. Retire el asiento y la batería de su Travel Scooter.
2. Use el anillo adjunto para tirar y extraer el pasador de retención de la parte inferior de la tija del asiento.
3. Eleve o baje la parte superior de la tija del asiento a la altura deseada.
4. Mientras sostiene la parte superior de la tija a esa altura, alinee los orificios de ajuste de las partes superior e inferior de la tija.
5. Inserte completamente el pasador de retención.
6. Vuelva a colocar la batería y el asiento.

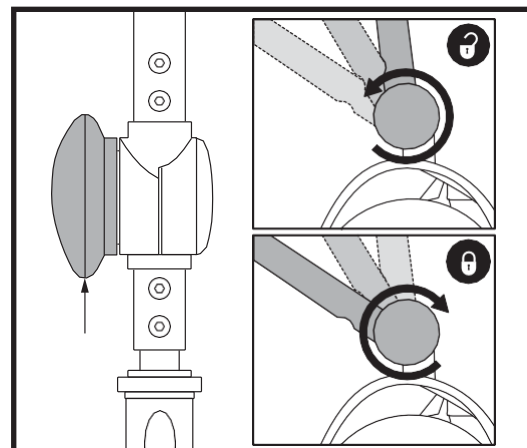


Figura 23. Pomo de ajuste del manillar

LLAVE DE IDENTIFICACIÓN

1. Pomos de ajuste del reposabrazos
2. Pasadores de retención
3. Palanca de rotación del asiento

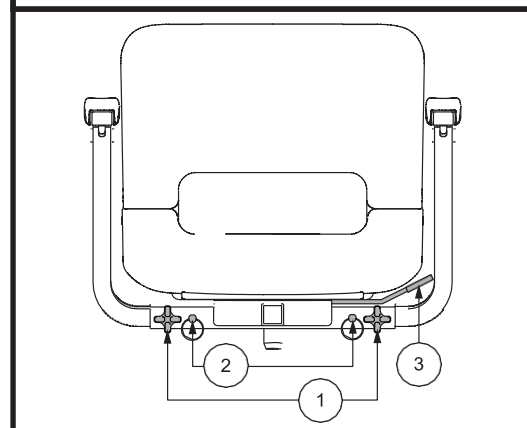


Figura 24. Ajustes de asiento

LLAVE DE IDENTIFICACIÓN

1. Parte superior de la tija
2. Parte inferior de la tija
3. Pin de retención

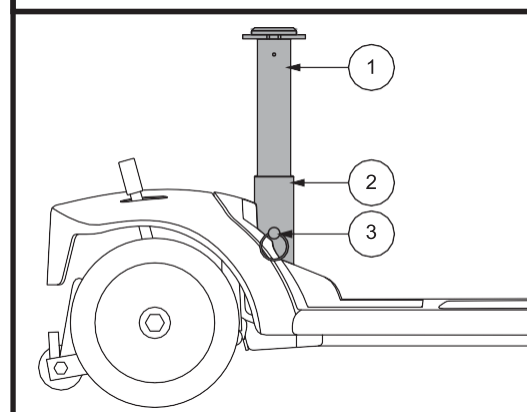


Figura 25. Ajuste de altura del asiento

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO (OPCIONAL)

Puede que el asiento de su scooter venga equipado con un cinturón de posicionamiento de tipo automático que puede ajustarse para proporcionar comodidad al conductor. **Ver Figuras 29 o 30.** El cinturón de posicionamiento está diseñado para ayudar a sujetar al conductor y que este no se deslice hacia abajo o se vaya hacia delante en el asiento. El cinturón de posicionamiento no está diseñado para su uso como dispositivo de sujeción.



ADVERTENCIA El cinturón de posicionamiento debe estar fijo en todo momento. Nunca permita que el cinturón de posicionamiento cuelgue o se arrastre por el suelo, ya que podría enredarse.

Para instalar el cinturón de posicionamiento (si es necesario):

1. Extraiga el asiento de su scooter.
2. Coloque el asiento boca abajo para poder ver la parte de abajo de la base del asiento. **Ver Figura 28.**
3. Use una llave inglesa para extraer los dos tornillos traseros en la parte más externa de la estructura del asiento.
4. Inserte el tornillo a través de los extremos correspondientes del cinturón de posicionamiento y luego vuelva a instalar los tornillos en la estructura del asiento.
5. Apriete los tornillos.

Cinturón de posicionamiento estilo lengüeta metálica

Para ajustar el cinturón de posicionamiento para mayor comodidad del conductor:

1. Inserte la lengüeta metálica en el lado derecho del cinturón dentro de la carcasa de plástico en la correa opuesta hasta que escuche un clic. **Ver Figura 29.**
2. Tire de la correa en el lado derecho del cinturón hasta que esté firme, pero no la apriete demasiado, ya que puede causar molestias.

Para soltar el cinturón de posicionamiento:

1. Presione el mecanismo del botón pulsador en la carcasa de plástico.

Cinturón de posicionamiento estilo cierre de velcro adhesivo reutilizable

Para ajustar el cinturón de posicionamiento para mayor comodidad del conductor:

1. Alinee los dos lados del cinturón colocando el extremo de rizo directamente sobre el extremo más áspero («gancho») en la otra parte del cinturón. Presione con firmeza para sujetarlos. **Ver Figura 30.**

Para soltar el cinturón de posicionamiento:

1. Sujete el extremo de rizo del cinturón y tire hacia arriba para separarlo del otro extremo del cinturón.

OBLIGATORIO Asegúrese de que el cinturón de posicionamiento esté bien sujeto a la scooter y esté ajustado cómodamente al conductor antes de cada uso.



OBLIGATORIO Antes de cada uso de la scooter, inspeccione el cinturón de posicionamiento en busca de piezas sueltas o daños, como roturas, partes desgastadas, material torcido, mecanismos de cierre dañados, suciedad o desechos. Si descubre un problema, póngase en contacto con su proveedor autorizado para el mantenimiento y reparación.

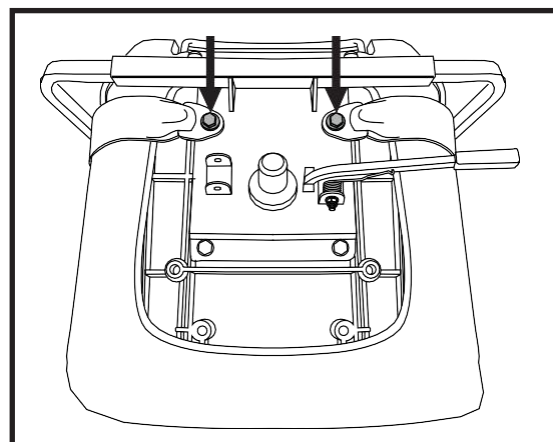


Figura 28. Tornillos del cinturón de posicionamiento

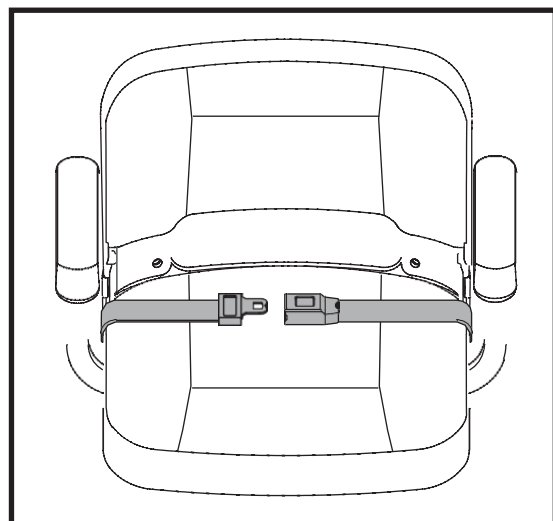


Figura 29. Cinturón de posicionamiento: estilo lengüeta metálica

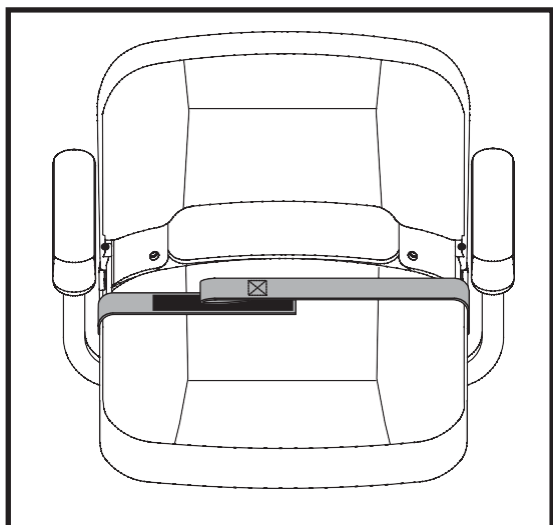


Figura 30. Cinturón de posicionamiento: estilo cierre de velcro adhesivo reutilizable

VI. DESMONTAJE Y MONTAJE

DESMONTAJE

Puede desmontar la Travel Scooter en varias piezas: el asiento, el almacenaje debajo del asiento, la parte trasera, la parte delantera, la canasta y la batería. **Ver Figura 31.** No se requieren herramientas para desmontar o montar su Travel Scooter. Siempre desmonte o monte su Travel Scooter en una superficie nivelada y seca con suficiente espacio para trabajar y moverse (alrededor de unos 1,5 metros) en todas las direcciones. Recuerde que algunos componentes de su Travel Scooter son pesados y que puede necesitar ayuda para levantarlos.



ADVERTENCIA No levante más peso de lo que le permita su capacidad física. Pida ayuda cuando sea necesario al desmontar o montar su Travel Scooter.

ADVERTENCIA No levante la estructura del asiento o la scooter por los reposabrazos. Pueden girar libremente y usted puede perder el control del asiento si lo hacen.

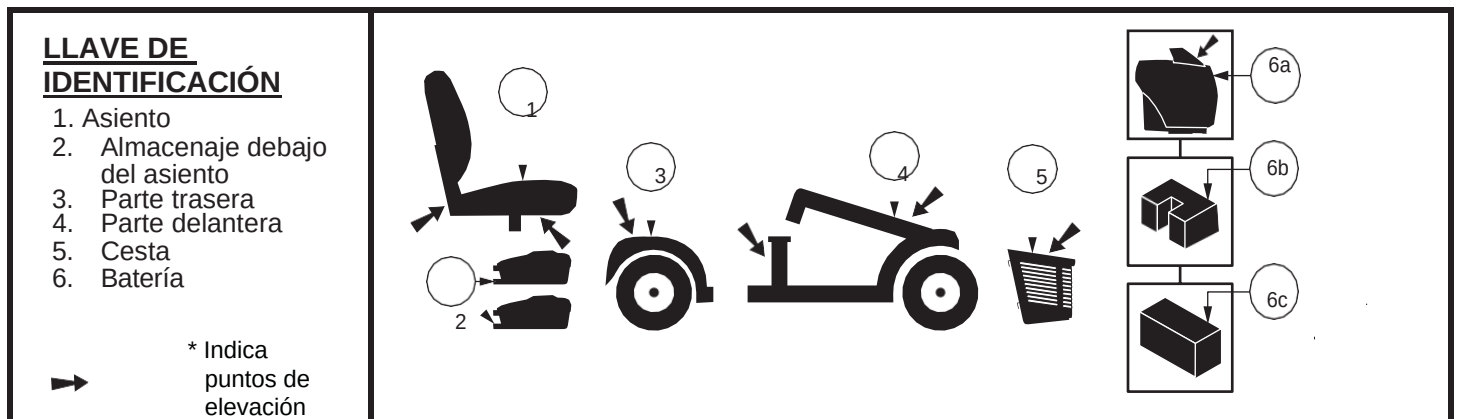


Figura 31. Travel Scooter desmontada

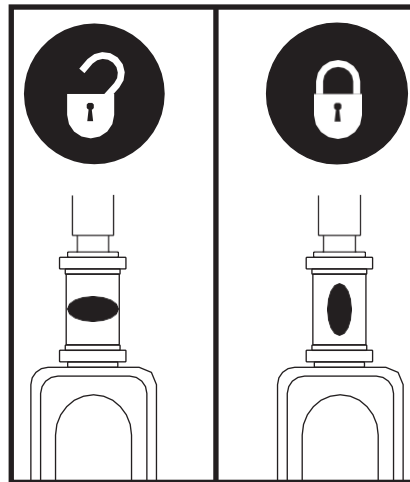


Figura 32. Botón de bloqueo del manillar

PROCEDIMIENTOS DE DESMONTAJE

1. Retire la llave del interruptor de llave y, a continuación, bloquee el manillar en posición de línea recta empujando el botón de bloqueo del manillar y girándolo en sentido horario 90°. **Ver Figura 32.** La rueda delantera debe estar orientada hacia delante para poder bloquear el manillar.
2. Extraiga el asiento levantándolo hacia arriba y hacia fuera de la Travel Scooter. Si encuentra resistencia al extraer el asiento, desbloquee la palanca de rotación del asiento y gire el asiento hacia atrás y hacia delante mientras lo levanta.
3. Extraiga la batería levantándola hacia arriba y hacia fuera de la Travel Scooter.

VI. DESMONTAJE Y MONTAJE

SEPARACIÓN DEL CHASIS

1. Con el asiento y la batería extraídos (consulte los procedimientos de desmontaje en la página anterior), baje el manillar y apriete el pomo de ajuste del manillar. **Ver Figura 23.**
2. Levante la palanca de desbloqueo del chasis y gire la parte trasera hacia atrás, hasta que los ganchos del chasis ya no descansen sobre el tubo del chasis inferior.
3. Separe lentamente ambas partes de la Travel Scooter. **Ver Figura 33.**

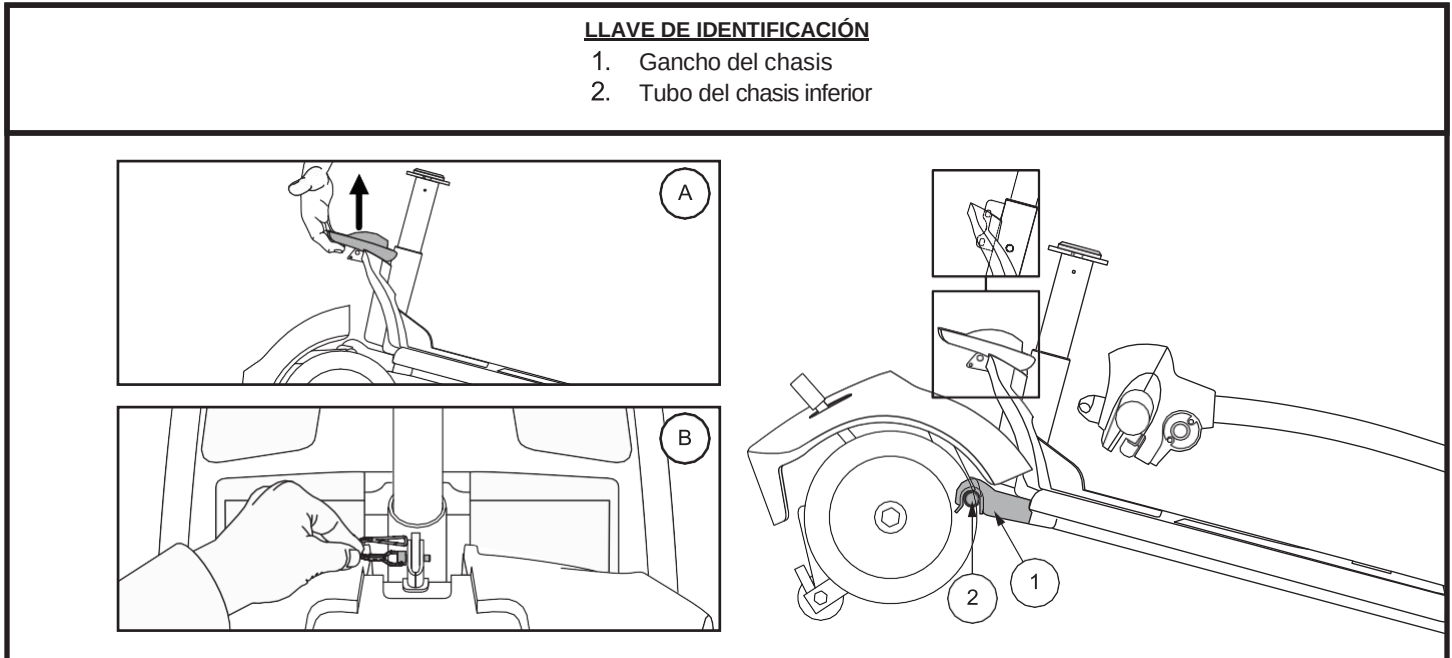


Figura 33. Palanca de desbloqueo del chasis (estilo A) y pasador de bloqueo para desbloquear el chasis (estilo B)

MONTAJE

NOTA: Antes comenzar con el montaje, incline la mitad trasera de la Travel Scooter ligeramente hacia atrás sobre las ruedas antivuelco como se muestra en la Figura 33.

1. Use la palanca de liberación del chasis para levantar la parte frontal mientras alinea los ganchos del chasis de la parte frontal con el tubo del chasis inferior de la parte posterior. **Ver Figura 33.**
2. Una vez los ganchos del chasis se encuentren sobre el tubo del marco inferior, baje la parte delantera y gire la parte trasera a la vez. Esto activará el bloqueo del chasis automáticamente.
3. Levante el manillar y apriete totalmente el pomo de ajuste del manillar. **Ver Figura 23.**
4. Vuelva a instalar la batería.
5. Vuelva a instalar el asiento y gírelo hasta que quede fijo en su posición.
6. Desbloquee el manillar girando el botón de bloqueo del manillar 90° en sentido antihorario. **Ver Figura 32.**



ADVERTENCIA Después del montaje, asegúrese de que el botón de bloqueo del manillar esté en la posición de desbloqueo antes de manejar su Travel Scooter.

VII. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS

Cualquier dispositivo electromecánico a veces requiere resolver algún problema. Sin embargo, la mayoría de los problemas que pueden surgir generalmente se resuelven con un poco de reflexión y sentido común. Muchos de estos problemas ocurren porque las baterías no están completamente cargadas o porque las baterías están gastadas y ya no pueden retener una carga.

CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO

Los códigos de diagnóstico para su Travel Scooter están diseñados para ayudarle a solucionar problemas básicos de manera rápida y fácil. Sonará o parpadeará un código de diagnóstico en caso de que se produzca una de las situaciones enumeradas a continuación. Dependiendo del modelo que posea, su Travel Scooter se comunicará mediante uno de los métodos de codificación siguientes:

1. Un código de diagnóstico comenzará, según el modelo, con una serie de pitidos y/o parpadeos rápidos seguidos inmediatamente por pitidos y/o parpadeos más lentos que indican el código exacto. El código solo suena y/o parpadea una vez. Para repetir el código de diagnóstico, extraiga la llave, luego vuelva a insertarla y gírela a la posición de encendido, **O**.
2. Un código de diagnóstico identificará la situación, hará una pausa y luego repetirá el código. El código de diagnóstico continuará alertándole de esta manera hasta que se apague la scooter.

NOTA: Su Travel Scooter no funcionará a menos que la situación del código de diagnóstico se resuelva y la Travel Scooter se apague y se vuelva a encender.

CÓDIGO DE DIAGNÓSTICO	SITUACIÓN	SOLUCIÓN
■ (1)	La tensión de la batería tiene un nivel demasiado bajo para que pueda manejar la Travel Scooter.	Cargue las baterías lo antes posible.
■■ (2)	La carga de la batería es demasiado baja.	Cargue la batería.
■■■ (3)	La tensión de la batería de la Travel Scooter tiene un nivel demasiado alto para que pueda manejar la scooter, o el cargador todavía está conectado al puerto del cargador externo.	Desenchufe el cargador o apague con la llave, luego vuelva a encender la scooter. Si conduce por una pendiente, reduzca la velocidad de la Travel Scooter a la configuración mínima.
■■■■ (4)	Se ha agotado el tiempo límite de corriente.	Apague la Travel Scooter durante unos minutos y después vuelva a encenderla.
■■■■■ (5)	La palanca de rueda libre manual está en la posición de rueda libre (hacia adelante).	Extraiga la llave del interruptor de llave, luego empuje la palanca de rueda libre manual a la posición de conducción (retroceso) y reinicie su Travel Scooter.
■■■■■■ (6)	La palanca de control del acelerador no está en la posición central al arrancar.	Compruebe que la batería esté completamente cargada. Si la batería está completamente cargada, vuelva a colocar la palanca de control del acelerador en la posición central, apague la Travel Scooter y vuelva a encenderla.
■■■■■■■ (7)	Error de potenciómetro de velocidad.	Póngase en contacto con su proveedor autorizado para obtener ayuda.
■■■■■■■■ (8)	Error de tensión del motor.	Póngase en contacto con su proveedor autorizado para obtener ayuda.
■■■■■■■■■ (9)	Otros errores internos.	Póngase en contacto con su proveedor autorizado para obtener ayuda.

¿Qué sucede si mi Travel Scooter no se mueve cuando presiono la palanca de control del acelerador?

- Cuando se empuja la palanca de rueda libre manual hacia adelante, se desbloquean los frenos y se corta toda la energía hacia el conjunto del motor/transeje.
- Tire hacia atrás de la palanca de rueda libre manual, apague la Travel Scooter y vuelva a encenderla para volver al modo de manejo normal.

VII. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS

¿Qué sucede si todos los sistemas de mi Travel Scooter parecen haber «muerto»?

- Asegúrese de que la llave se encuentre en la posición de encendido.
- Compruebe que la batería esté completamente cargada.
- Presione el botón de reinicio del disyuntor principal. Ver II. Su Travel Scooter.
- Asegúrese de que la batería está colocada correctamente.
- Asegúrese de que la función de temporizador de apagado no se haya activado. Ver IV. Manejo.
- Compruebe el fusible de la consola del manillar ubicado debajo de la batería.

Para comprobar un fusible:

1. Retire el fusible sacándolo de su ranura.
2. Examine el fusible para comprobar que está fundido.
3. Inserte un nuevo fusible con la capacidad adecuada.



ADVERTENCIA El fusible de reemplazo debe coincidir exactamente con la capacidad del fusible antiguo. La no utilización de fusibles con la capacidad y la aprobación adecuadas puede provocar daños en el sistema eléctrico.

¿Qué pasa si la batería de la Travel Scooter no se carga?

- Compruebe el fusible ubicado en la batería o la consola. Reemplace si es necesario.
- Durante el proceso de carga, si los ledes del cargador nunca indican una carga completa, compruebe el fusible ubicado en la batería o la consola. Reemplace si es necesario, o pida a su proveedor autorizado o técnico cualificado que revise y/o reemplace el fusible.
- Asegúrese de que ambos extremos del cable de alimentación del cargador estén conectados correctamente.
- Si el fusible de la batería se quema continuamente, comuníquese con su proveedor autorizado para que le ayude.

¿Qué pasa si el disyuntor principal se activa repetidamente?

- Si el disyuntor principal se activa repetidamente, pida ayuda a su proveedor autorizado.
- Cargue la batería de la Travel Scooter con más frecuencia. Ver III. Baterías y carga.
- Si el problema continúa, pida a su proveedor autorizado que realice pruebas de carga de la batería de su Travel Scooter.
- También puede realizar la prueba de carga usted mismo. Los medidores de carga de baterías están disponibles en la mayoría de las tiendas de repuestos de automóviles.
- Siga las instrucciones proporcionadas con el medidor de carga.
- Ver III. Baterías y carga u Hoja de especificaciones del producto para obtener información sobre el tipo de batería de su Travel Scooter.

¿Qué sucede si el indicador de nivel de la batería baja mucho y el motor se sobrecarga o duda cuando presiono la palanca de control del acelerador?

- Cargue completamente la batería de su Travel Scooter. Ver III. Baterías y carga.
- Pida a su proveedor autorizado que pruebe la carga de cada batería.
- O consulte la pregunta anterior del apartado de solución de problemas para probar la batería usted mismo.

Si tiene algún problema con su Travel Scooter que no puede resolver, comuníquese de inmediato con su proveedor autorizado para obtener información, mantenimiento y servicio.

VIII. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su Travel Scooter requiere una cantidad mínima de cuidado y mantenimiento. Si no confía en su capacidad para realizar el mantenimiento que se detalla a continuación, puede concertar la inspección y el mantenimiento con su proveedor autorizado. Las siguientes áreas requieren inspección periódica y/o cuidado y mantenimiento.

NEUMÁTICOS

Inspeccione regularmente los neumáticos de su Travel Scooter para detectar signos de daños o desgaste.

SUSTITUCIÓN DE RUEDA

SuTravel Scooter está equipada con insertos de neumáticos sólidos. Si tiene un neumático dañado o desgastado, debe sustituir la rueda completa. Póngase en contacto con su proveedor autorizado para obtener información sobre las ruedas de repuesto para su Travel Scooter.

ADVERTENCIA Las ruedas de su Travel Scooter solo deben ser reparadas o sustituidas por un técnico cualificado.



ADVERTENCIA Asegúrese de extraer la llave del interruptor de llave y de que la scooter no se encuentra en modo de rueda libre antes de realizar este procedimiento.

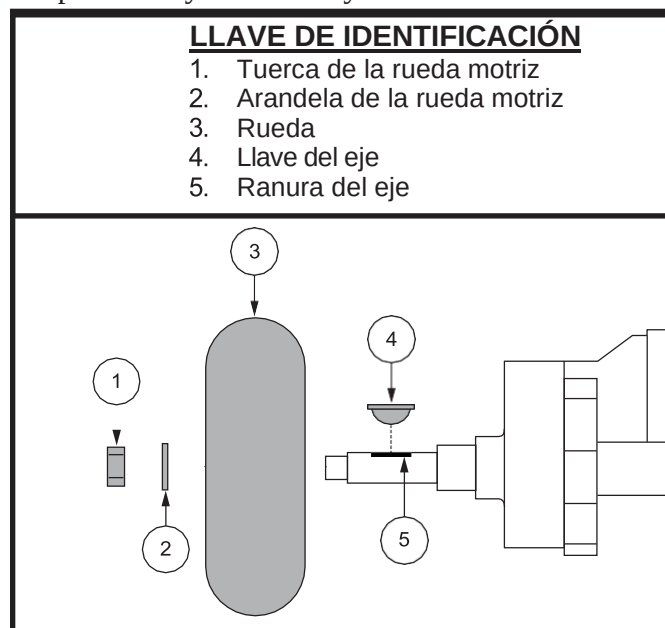


Figura 35 Sustitución de ruedas

Siga estos sencillos pasos para una reparación rápida y segura de neumáticos sólidos:

1. Extraiga la llave del interruptor de llave y asegúrese de que su Travel Scooter no se encuentre en modo de rueda libre.
2. Eleve el lateral de la Travel Scooter en el que está retirando el neumático. Coloque bloques de madera debajo del chasis para elevar la Travel Scooter.
3. Retire la tuerca de la rueda motriz y la arandela del eje. **Ver Figura 35.**
4. Saque la rueda del eje.
5. Deslice la nueva rueda dentro del eje. Asegúrese de que la llave del eje esté en la ranura del eje.



ADVERTENCIA Asegúrese de que la llave del eje esté instalada correctamente en la ranura del eje cuando monte la rueda. Si no se instala de manera segura, el sistema de frenado se desactiva, lo que puede causar lesiones personales o daños al vehículo.

6. Vuelva a instalar la arandela y la tuerca de la rueda motriz en el eje y apriételas.



ADVERTENCIA Asegúrese de que tanto la tuerca como la arandela estén reinstaladas y apretadas adecuadamente.

7. Retire los bloques de debajo de la Travel Scooter.

SUPERFICIES EXTERIORES

Los parachoques, los neumáticos y los embellecedores pueden beneficiarse de la aplicación ocasional de un acondicionador de caucho o vinilo.



ADVERTENCIA No use un acondicionador de caucho o vinilo en la banda de rodamiento o el asiento de vinilo de la Travel Scooter. Se volverán peligrosamente resbaladizos.

LIMPIEZA Y DESINFECCION

- Use un paño húmedo y un limpiador suave no abrasivo para limpiar las piezas de plástico y metal de su Travel Scooter. Evite usar productos que puedan rayar la superficie de su Travel Scooter.
- Si es necesario, limpie el vehículo con un desinfectante aprobado. Asegúrese de que el uso del desinfectante en su vehículo sea seguro antes de la aplicación.

VIII. CUIDADO Y MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA Siga todas las instrucciones de seguridad para el uso adecuado del desinfectante o el producto de limpieza antes de aplicarlo a su vehículo. No seguir las instrucciones puede ocasionar irritación de la piel o deterioro prematuro de la tapicería o los acabados de la Travel Scooter.

CONEXIONES DE LOS TERMINALES DE LA BATERÍA

Asegúrese de que las conexiones de los terminales permanecen ajustadas y no están corroídas.

CABLEADO

- Compruebe regularmente todas las conexiones de cableado.
- Compruebe regularmente todo el aislamiento del cableado, incluido el cable de alimentación del cargador, en busca de desgaste o daños.
- Pida a su proveedor autorizado que repare o reemplace cualquier conector, conexión o aislamiento dañado que encuentre antes de volver a usar su Travel Scooter.



PROHIBIDO Aunque la Travel Scooter ha superado los requisitos de prueba necesarios para la penetración de líquidos, debe mantener las conexiones eléctricas lejos de las fuentes de humedad, incluida la exposición directa al agua o fluidos corporales e incontinencia. Revise los componentes eléctricos con frecuencia para detectar signos de corrosión y reemplácelos según sea necesario.



ADVERTENCIA No tire del cableado eléctrico directamente para desconectarlo de la scooter. Sujete siempre el conector al desconectar el cableado para evitar dañar los cables.

COMPROBACIONES DIARIAS

- Con la corriente desconectada, verifique el acelerador. Asegúrese de que no esté doblado o dañado y que vuelve a la posición neutral cuando lo suelta. No intente repararlo. Consulte a su proveedor autorizado si hay un problema.
- Inspeccione visualmente el cable del manillar. Asegúrese de que no esté deshilachado, cortado o que tenga cables expuestos. Consulte a su proveedor autorizado si hay un problema.
- Compruebe si hay puntos planos en los neumáticos sólidos. Los puntos planos podrían afectar negativamente a la estabilidad.
- Inspeccione los reposabrazos en busca de piezas sueltas, puntos de tensión o daños. Consulte a su proveedor autorizado si encuentra algún problema.
- Revise los frenos. Esta prueba debe realizarse en una superficie nivelada con al menos 1 metro de espacio libre alrededor de su scooter.

Para revisar los frenos:

1. Arranque la Travel Scooter y baje el nivel de velocidad.
2. Después de un segundo, compruebe el indicador de nivel de la batería. Asegúrese de que permanezca encendido.
3. Lentamente, empuje el acelerador hacia adelante hasta que escuche el chasquido de los frenos eléctricos. Inmediatamente suelte el acelerador. Debe ser capaz de escuchar el accionamiento del freno eléctrico a los pocos segundos de mover el acelerador. Repita esta prueba tirando del acelerador en la dirección opuesta.

COMPROBACIONES SEMANALES

- Inspeccione el controlador y los conectores del cargador en busca de corrosión. Póngase en contacto con su proveedor autorizado si es necesario.
- Compruebe que la presión de los neumáticos es la correcta, si está equipada con ruedas neumáticas. Si un neumático no retiene el aire, póngase en contacto con su proveedor autorizado para reemplazar la cámara.

COMPROBACIONES MENSUALES

- Compruebe que las ruedas antivuelco no rozan el suelo cuando utiliza la Travel Scooter.
- Compruebe si existe un desgaste extremo en las ruedas antivuelco. Reemplácelas si es necesario.
- Compruebe si existe un desgaste de neumáticos. Consulte a su proveedor autorizado para la reparación.
- Mantenga su Travel Scooter limpia y libre de materiales extraños, como barro, suciedad, cabello, alimentos, bebidas, etc.

VIII. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

COMPROBACIONES ANUALES

Lleve la Travel Scooter a su proveedor autorizado para realizar un mantenimiento anual, especialmente si usa su Travel Scooter a diario. Esto ayuda a garantizar que funcione correctamente y a prevenir futuras complicaciones.

CUBIERTAS DE PLÁSTICO ABS

Si la scooter tiene una carrocería para el cuerpo con un **acabado brillante**, la carrocería ha sido rociada con un revestimiento aislante transparente. Puede aplicar una ligera capa de cera para automóviles para ayudarle a conservar su aspecto brillante. Si su Travel Scooter tiene una carrocería para el cuerpo con un **acabado mate**, use SOLO productos diseñados para pinturas con acabado mate. No use cera, un aerosol de detalle, ArmorAll® ni ningún producto destinado a pinturas brillantes.



ADVERTENCIA Elija cuidadosamente el producto correcto para proteger el acabado de la carrocería de su Travel Scooter. Los productos diseñados para una pintura con acabado mate deben usarse SOLO en carrocerías con un acabado mate. El incumplimiento de esta advertencia puede provocar daños en el acabado de la pintura mate de la carrocería.

RODAMIENTOS DEL EJE Y EL CONJUNTO DE MOTOR/EJE TRANSVERSAL

Todas estas piezas están lubricadas, selladas y no requieren lubricación posterior.

CONSOLA, CARGADOR Y ELECTRONICA EN LA PARTE TRASERA

- Mantenga estas zonas sin humedad.
- Deje que estas áreas se sequen completamente si han estado expuestas a la humedad antes de volver a utilizar su Travel Scooter.

SUSTITUCIÓN DE UNA TUERCA DE BLOQUEO DE NAILON

Cualquier tuerca de bloqueo de nailon extraída durante el mantenimiento periódico, el montaje o el desmontaje de la Travel Scooter debe reemplazarse por una tuerca nueva. Las tuercas de bloqueo de nailon no deben reutilizarse, ya que pueden dañar el nailon, lo que provocaría un ajuste menos seguro. Las tuercas de bloqueo de nailon de repuesto están disponibles en ferreterías locales o a través de su proveedor autorizado.

ALMACENAMIENTO DE SU TRAVEL SCOOTER

Si tiene planificado no usar su Travel Scooter durante un periodo prolongado, le recomendamos que:

- Cargue completamente la batería antes de almacenarla.
- Retire la batería de la Travel Scooter.
- Guarde la Travel Scooter en un ambiente cálido y seco.
- Evite guardar su Travel Scooter donde vaya a estar expuesta a temperaturas extremas.
- Temperatura de almacenamiento recomendada: -40 °C a 65 °C.

Las baterías que se descargan de manera regular y completa, se cargan con poca frecuencia, se almacenan a temperaturas extremas o sin una carga completa pueden sufrir daños permanentes, lo que provoca un rendimiento poco fiable y una vida útil limitada. Se recomienda cargar la batería de la Travel Scooter regularmente durante periodos prolongados de almacenamiento para asegurar su correcto funcionamiento.



ADVERTENCIA Proteja siempre la batería de temperaturas bajo cero y nunca cargue una batería congelada. Cargar una batería congelada puede dañar la batería.

Para un almacenamiento prolongado, es posible que desee colocar varias tablas debajo del chasis de su Travel Scooter para levantarla del suelo. Esto aligera el peso de los neumáticos y reduce la posibilidad de que se creen puntos planos en las partes de los neumáticos en contacto con el suelo.

DESECHO DE SU TRAVEL SCOOTER

Su Travel Scooter debe desecharse de acuerdo con las normativas legales aplicables a nivel local y nacional. Póngase en contacto con su oficina de gestión de residuos local o con un proveedor autorizado para obtener información sobre la eliminación adecuada de envases, componentes con estructura metálica, componentes de plástico, electrónica, baterías, neopreno, silicona y materiales de poliuretano.

NOTAS

Fabricante:

Suzhou Sweetrich Vehicle Industry Technology co., Ltd.
No.68 XinFa Road, Suzhou
Industrial Park, Jiangsu,
China, 215123

Representante de la UE:

SWEMO GmbH
Adenauerstrasse 6
52146, Wuerselen,
Alemania

Distribuidor del Reino Unido:

Pride Mobility Ltd
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire
OX26 4UL

www.pride-mobility.co.uk

SN: