

7. Solución de problemas

320-07466 02/19 es



En caso de que el dispositivo dé ciertos problemas, se mostrará un código de error en la pantalla. A continuación, se describen las causas y la solución.

Código de error	Causa	Solución
	El controlador direccional se desvió cuando el brazo se giró hacia arriba.	Baje el brazo y vuelva a encender el dispositivo.
	El controlador direccional no estaba en posición neutra cuando se encendió el dispositivo.	Vuelva a encenderlo sin tocar el controlador direccional.
	Los frenos estaban desbloqueados.	Bloquee los frenos.
	El conector de CC estaba conectado cuando el dispositivo estaba encendido, o bien se ha encendido cuando se estaba cargando.	Desconecte el conector de CC del dispositivo.
	Nivel de batería bajo.	Vuelva a cargar la batería.
	El límite de velocidad se ha activado después de que la temperatura de la batería haya bajado considerablemente.	Guarde la batería a temperatura ambiente o al menos a una temperatura superior a 0 °C hasta que la temperatura de la batería suba a más de 0 °C.
	El límite de velocidad se ha desactivado después de que la temperatura de la batería ha superado los 0 °C.	El límite de velocidad por temperatura baja de la batería se ha desactivado.
	El dispositivo puede estar en una pendiente de 10° o más. Evalúe las condiciones reales y utilice este código de error tan solo como guía.	Conduzca con cuidado y lentamente hacia un lugar en el que el ángulo de inclinación sea de 10° o menos.

Model C

Vehículo eléctrico personal inteligente



Montaje

1

Operaciones básicas

2

Aplicación para smartphones

3

Modo libre

4

Carga

5

Desmontaje

6

Solución de problemas

7



Este documento no sustituye al manual del usuario.
Lea el manual del usuario en su totalidad antes de usar el dispositivo.

1. Montaje



1 Conectar el chasis trasero al delantero



Coja el agarre A y alinee el B con el gancho del chasis trasero.

Incline lentamente hacia delante el chasis trasero para unirlo al delantero. Cuando los dos componentes se conecten correctamente, oírás un clic.



Asegúrese de que la barra antivuelco esté bajada.

2 Instalar la cesta de almacenaje (si se ha adquirido)



Alinee la cesta de almacenaje con el chasis trasero. Gire la cesta de almacenaje y colóquela en el chasis delantero. Enganche el velcro de la parte inferior de la cesta de almacenaje con el chasis delantero.

3 Instalar el ensamblaje del asiento



Extraiga el cojín y levante el ensamblaje del asiento agarrando los reposabrazos.



Palanca de bloqueo del asiento

Utilice el orificio de inspección para alinear y colocar el ensamblaje del asiento en la tija del asiento. Baje la palanca de bloqueo del asiento y vuelva a instalar el cojín en el armazón de la silla.

4 Instalar la batería



Faro trasero

Coja el agarre y alinee la batería con las pestañas situadas en la parte inferior del compartimento. Presione la parte superior de la batería para instalarla. El faro trasero se iluminará y, a continuación, se apagará. ¡Ya ha acabado!



Asegúrese de cargar la batería completamente antes del uso.

2. Operaciones básicas



Asegúrese de desactivar la alimentación antes de entrar en el dispositivo o salir de él.

Panel de control Ensamblaje del controlador direccional


Pantalla
Se muestra el nivel de la batería (del 0 % al 100 %).

Suba o baje la velocidad

Botón de sonido
Para avisar a las personas de su presencia.

Botón de encendido

Controlador direccional

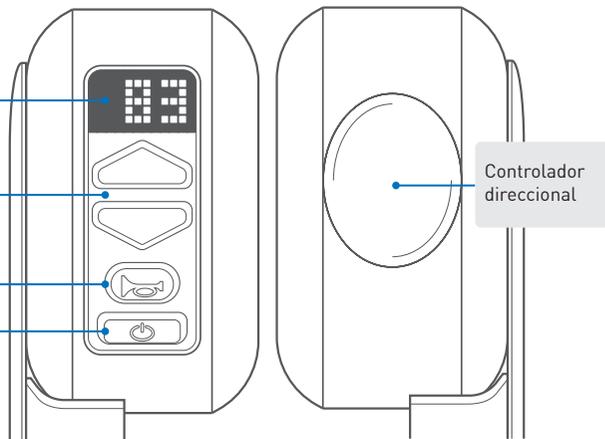

1 Entrada Asegúrese de que la pantalla esté apagada antes de sentarse en el asiento.

2 Encendido Compruebe que la pantalla se ilumina cuando pulse el botón de encendido.


3 Conducción Inclíne lentamente el controlador direccional hacia la dirección a la que desee desplazarse.

4 Parada Para parar el dispositivo, retire su mano del controlador direccional.

5 Apagado Compruebe que la pantalla se apaga cuando pulse el botón de encendido.

6 Salida Asegúrese de que la alimentación está desconectada (la pantalla está apagada) antes de salir del dispositivo.

3. Aplicación para smartphones

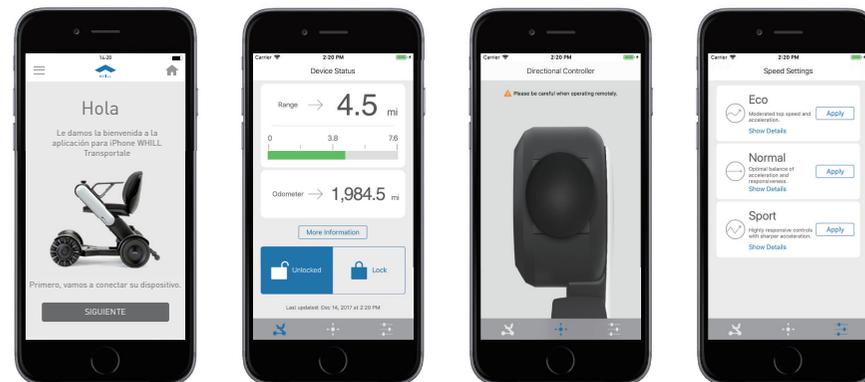

1. Descargue la aplicación de WHILL Model C en la App Store de Apple o la Google Play Store.
2. Asegúrese de tener "activado" el Bluetooth en su smartphone (así es cómo el smartphone se conecta al Model C).
3. Abra la aplicación e introduzca la identificación de inicio de sesión y la contraseña.
4. Si dispone de un smartphone compatible, pulse "Conectar" y podrá configurar los ajustes de velocidad o conducir de forma remota.

Nota: La disponibilidad de la aplicación de WHILL Model C dependerá de la región que seleccione.

4. Modo libre

Para mover de forma manual el Model C, baje las palancas de bloqueo del freno rojas situadas en ambos lados. El modo libre puede utilizarse cuando la batería del Model C esté agotada o cuando quede inoperable por cualquier otro motivo.



Nunca desbloquee los frenos en pendientes.
Asegúrese de que se encuentra en una superficie plana antes de desbloquearlos.

5. Carga

1 Cargar la batería cuando está instalada en el dispositivo

Acerque el vehículo a una toma de pared y apáguelo.

Conecte el cargador a la toma de pared estándar.
Compruebe que el indicador del cargador se haya vuelto rojo.

Abra la tapa y conecte el conector de CC al puerto del cargador.
La carga empezará cuando la luz verde del indicador del cargador parpadee.

La batería estará completamente cargada cuando la luz verde deje de parpadear y se quede fija.

Desconecte el conector de CC y cierre la tapa del puerto del cargador.

2 Cargar la batería cuando está fuera del dispositivo

Retire la batería del dispositivo.

Conecte el cargador a la toma de pared estándar.
Compruebe que el indicador del cargador se haya vuelto rojo.

Abra la tapa y conecte el conector de CC al puerto del cargador. La carga empezará cuando la luz verde del indicador del cargador parpadee. En ese momento, el indicador de nivel de carga del lateral de la batería también parpadeará para mostrar el estado de carga.

La batería estará completamente cargada cuando la luz verde deje de parpadear y se quede fija. El indicador del nivel de carga se apagará. Para comprobar el nivel de carga restante de la batería, pulse el botón de nivel de carga.

Desconecte el conector de CC y cierre la tapa del puerto de carga.
A continuación, vuelva a instalar la batería en el dispositivo.



6. Desmontaje para el almacenamiento o el transporte

1 Extraer la batería

Extraiga la batería cogiendo el agarre y tirándola hacia usted.

! Compruebe que la batería no esté bloqueada.

2 Extraer el asiento



Saque los ganchos de la cesta de almacenaje (si se ha adquirido) de las barras accesorias.



Tire de la palanca de bloqueo del asiento hacia usted.



3 Extraer la cesta de almacenaje (si se ha adquirido)

Levante la cesta para desenganchar el velcro de la parte inferior que la fija al chasis delantero. Gire la cesta hacia delante mientras la sigue sosteniendo y sepárela del chasis trasero.

4 Extraer el chasis delantero



Tire de la palanca de bloqueo de la base hacia usted.



Por dónde debe agarrar los siguientes componentes:



Chasis delantero: agarre situado en el extremo del reposapiés y el agarre A.



*Sujete el chasis trasero con sus manos cuando lo extraiga para asegurarse de que no se caiga.