

— FOLLETO DE INSTRUCCIONES —

LA PLAYA

Y LA

PISCINA PARA

TOIDOS

SILLA DE BAÑO ANFIBIA PRÁCTICA

Completamente plegable sin ninguna herramienta, la SO-FAO cabe en el maletero del coche.



Se montan las ruedas sobre ejes que son completamente extraíbles.
Pues, es fácil sujetarlas con la clavija preinstalada.

La asa delantera de la Sofao permite desplazarla en terrenos móviles y facilita la entrada y la salida del agua.



RECOMENDACIONES PARA EL USO



¡No olvide desplegar los 4 flotadores antes de la puesta al agua porque son los que aseguran la flotación y la estabilidad!

SOFAO À LA PISCINE



Una vez que se hayan ensamblado las ruedas, se puede llevar la silla Sofao hasta el lugar de baño: su anchura inferior a 80 cm le permite pasar cualquier tipo de puerta de entrada a las piscinas.



Los reposabrazos son plegables para permitir una transferencia fácil de la silla de ruedas a la SOFAO. Gracias al respaldo regulable (5 posiciones), se puede poner la SOFAO de manera horizontal para cambiar o duchar al bañista antes de entrar a la piscina.



Hacen falta 20 segundos para plegar y desplegar la Sofao y sin ninguna herramienta... El pequeño tamaño de la silla plegada permite un almacenamiento fácil.



Los cinturones de seguridad no son obligatorios. Es posible dejarlos detrás del respaldo si los bañistas no los necesitan.



El acompañante, equipado con suelas antideslizantes, puede poner al bañista en el agua dejando la silla rodar al borde de la piscina. Para sacar la silla del agua, bastará con retroceder a la inversa.

En caso de que los bañistas no sean ligeros, se recomienda un acompañante atrás y otro en la piscina.

OPCIÓN PISCINA

RUEA DELANTERA



La rueda delantera para piscina se monta en la parte delantera de la Sofao con una llave de 13mm.

Facilita las maniobras y los desplazamientos del acompañante en piscina sobre superficies de tipo embaldosado u hormigón.

El freno permite inmovilizar la Sofao durante las transferencias.

RESPALDO

Se puede ajustar el respaldo en 5 posiciones con el fin de encontrar la posición adecuada.

Se ajusta con la mano o simplemente presionando el pie sobre el cable situado en la parte inferior del respaldo.



FLOTADORES REGULABLES



Se puede ajustar el nivel del agua en la silla gracias a los 4 flotadores regulables.

Para una mayor comodidad de utilización, los flotadores se deben poner a nivel de los hombros.

Siempre es posible ajustarlos cuando la silla esté en el agua.

OPCIÓN PLAYA

TIRA - SOFAO



La tira-Sofao permite tirar la Sofao sin esfuerzo sobre cualquier tipo de terreno sin tener que levantarla. La rueda delantera direccional está conectada a la barra de tracción, lo que garantiza un manejo cómodo.

PAR DE RUEDAS ADICIONAL



El par de ruedas adicional facilita el manejo de la Sofao en terreno móvil, particularmente arena. Se montan sin herramientas con los ejes de ruedas originales.

APOYACABEZA MULTIPOSICIÓN

APOYACABEZA MULTIPOSICIÓN



El apoyacabeza multiposición ayuda a sostener la cabeza del usuario. El posicionamiento es ajustable en función de su tamaño.

USO



El bañista puede moverse en el agua efectuando algunos movimientos de los brazos. Si no es posible, el acompañante puede desplazar la Sofao y el pasajero utilizando el mango trasero o delantero. El bañista siempre debe estar bajo la vigilancia de un adulto.

CALIDAD

Gracias a su aluminio anodizado, su estructura en acero inoxidable electropulido y su tejido Batyline[®], no se requiere ningún mantenimiento. Basta con un simple enjuague después de cada utilización, particularmente en las bisagras.



¡QUE TENGA UN BUEN BAÑO!

Sofao es un producto patentado y una marca registrada.